

체크리스트

A-dec 장비에 대한 예방 차원의 유지 보수

A-dec에서는 매년, 또는 1,500시간의 임상 사용 후 예방 차원의 유지 보수를 수행할 것을 권장합니다.

의자

- 터치패드(장착된 경우)와 풋 스위치(장착된 경우)를 사용하여 의자 리프트, 틸트 및 프로그래밍 기능의 작동을 확인하고 권장되는 수리 또는 교체에 대해 조언합니다.
- 모든 장비 정지 플레이트/스위치 및 의자 잠금 기능(장착된 경우)을 확인하여 올바르게 기능하는지 확인합니다.
- 이동 범위를 확인하고 필요에 따라 한계를 조정하여 충돌 손상 가능성을 최소화합니다.
- 유압 용액 누출을 확인합니다.
- 유압 용액 저장소 수준을 확인하고 필요에 따라 채웁니다.
- 유압 실린더에서 킁 소리와 기타 불규칙한 소음(유압 호스가 커버에 닿아 나는 소리 등)이 나는지 확인하고 필요에 따라 조정합니다.
- 머리 받침 글라이드 바 장력을 확인하고 필요에 따라 조정합니다.
- 스위블 브레이크(장착된 경우) 작동을 확인하고 필요에 따라 조정합니다.
- 팔걸이 장력(해당하는 경우)을 확인하고 필요에 따라 조정합니다.
- 쿠션 상태를 확인하고 적절한 경우 교체를 권장합니다.

참고

딜리버리 시스템

- 손상되었거나 부서졌거나 뻣뻣한 핸드피스 튜브를 확인하고 필요에 따라 교체를 권장합니다.
- 핸드피스 커플러 O-링의 상태를 확인하고 필요에 따라 수리에 대해 조언합니다.
- 컨트롤 블록 밸브 상태를 확인합니다. 5년마다, 또는 필요에 따라 더 자주 밸브 본체 O-링을 교체합니다.
- 핸드피스 압력을 확인하고 필요에 따라 제조업체 사양에 맞게 조정합니다.
- 광섬유 전압(장착된 경우)을 확인하고 필요에 따라 핸드피스 제조업체의 사양에 맞게 조정합니다.
- Continental 딜리버리 시스템에만 해당: 힙 압 움직임을 확인하고 필요에 따라 장력을 조정합니다.
- 핸드피스 홀더 바 장력(해당하는 경우)을 확인하고 필요에 따라 조정합니다.
- 시린지 O-링과 버튼-밸브 조립부를 교체하고, A-dec 실리콘 윤활제를 바르고, 작동을 확인합니다.
- 핸드피스 플러시 시스템 작동을 확인합니다.
- 에어 브레이크(장착된 경우)와 플렉스암 스프링(장착된 경우)의 작동을 확인하고 필요에 따라 조정합니다.

참고

딜리버리 시스템(계속)

- 집유기에 오일 또는 물이 쌓여 있는지 확인하고, 거즈를 교체하고, 필요에 따라 청소합니다.
- 독립식 급수통 밀봉 와셔 또는 O-링을 확인하고, 필요에 따라 교체하고, A-dec 실리콘 윤활제를 O-링에 바릅니다.
- 고객의 치과용 장치 급수관 유지 보수 규정과 최근 급수관 테스트를 검토하여 CFU 수가 한계 수준 아래임을 확인합니다. A-dec 급수관 유지 보수 안내서(p/n 85.0983.09)를 참조하여 고객에게 필요에 따라 조언합니다.

풋 컨트롤

- 풋 컨트롤 튜브의 상태를 확인합니다.
- O-링과 트림 링을 검사하고, 필요에 따라 교체하고, A-dec 실리콘 윤활제를 O-링에 바르고, 올바르게 작동하는지 확인합니다.
- 5년마다, 또는 필요에 따라 더 자주 다이어프램을 교체합니다.
- 레버 풋 컨트롤만 해당: 필요에 따라 레버 풋을 청소하거나 교체합니다.

참고

보조자용 기구 및 진공

- 진공 튜브의 손상 또는 누출을 검사하고 필요에 따라 교체를 권합니다.
- 손상되었거나 부서진 튜브를 확인하고 필요에 따라 교체를 권합니다.
- 시린지 O-링과 버튼-밸브 조립부를 교체하고, A-dec 실리콘 윤활제를 바르고, 작동을 확인합니다.
- 고용량 흡입기(HVE)와 타액 배출기 O-링을 교체하고, A-dec 실리콘 윤활제를 바르고, 올바르게 작동하는지 확인합니다.
- 진공 캐니스터, 튜브 및 밸브 조립부의 O-링을 교체합니다. A-dec 실리콘 윤활제를 바르고 올바르게 작동하는지 확인합니다.
- 고형물 수집기 화면을 검사합니다. 일회용 화면을 교체하거나 재사용 가능 화면을 청소하고 필요에 따라 교체를 권합니다.
- 고형물 수집기 캡 O-링 및 연결 O-링을 확인하고 필요에 따라 교체합니다.
- 설치된 경우 아말감 수준을 포함하여 아말감 제거기의 작동을 확인합니다.
- 진공 시스템 세제가 사용되고 있는지 확인하고 필요에 따라 조언합니다.
- 하부 서포트 암과 후면 서포트 링크 정지 스위치의 작동을 확인합니다(장착된 경우).

참고

치과용 라이트

- 의자 사전 설정 위치 컨트롤로 치과용 라이트 자동 온/오프 작동을 포함하여 컨트롤과 온/오프 스위치의 작동을 확인합니다.
- 모든 강도/모드 설정 및 컨트롤을 확인합니다.
- 할로겐 라이트에만 해당: 토글 스위치가 확실하게 설치되었는지 확인하고 필요에 따라 고정 너트를 조입니다.
- 라이트 핸들이 확실하게 부착되었는지 확인합니다.

참고

치과용 라이트(계속)

참고

- 라이트 실드에 균열이나 마모가 있는지 확인합니다. 필요한 경우 교체합니다.
- 라이트 헤드 조립부의 회전 움직임을 위한 각 축의 장력을 확인하고 필요에 따라 조정합니다.
- 라이트 암의 수직 움직임을 위한 스프링 장력을 확인하고 필요에 따라 조정합니다.
- 회전 리미트 정지가 제자리에 있는지 확인하고 필요에 따라 조정합니다.
- 할로겐 라이트만 해당: 예비 전구가 있는지 확인합니다.

타구대

참고

- 손상되었거나 부서진 튜브를 확인하고 필요에 따라 교체를 권합니다.
- 컵필 및 보울 린스의 작동과 시간을 확인하고 필요에 따라 고객이 원하는 대로 조정합니다.
- 컵필 및 보울 린스 분수관 O-링을 검사하고, 필요한 경우 교체하고, A-dec 실리콘 윤활제를 O-링에 바릅니다.
- 배수관을 청소 및 세척하고 올바르게 작동하는지 확인하고 배수관 구멍이 작동하는지 확인합니다.
- 타구대 배수관 라인에 누출이 있는지 확인하고 필요에 따라 수리에 대해 조언합니다.
- 타구대 리미트 스위치 작동을 확인합니다.

플로어 박스

참고

- 공기 및 물 필터를 교체합니다.
- 공기 및 물 조절기 다이어프램을 교체합니다.
- 들어오는 공기와 물의 압력을 확인하고 필요에 따라 조정합니다.
- 공기와 물 누출이 있는지 확인합니다.
- 손상되었거나 부러졌거나 뺏뺏한 튜브가 있는지 확인합니다.
- 들어오는 공기를 확인하여 깨끗하고 건조한 공기가 딜리버리 시스템에 전달되고 있는지 확인합니다. 플로어 박스와 압축기의 습기 제거기를 확인하고 필요에 따라 습기 제거기 필터를 교체합니다.

기타

참고

- 모든 터치패드 버튼의 기능을 테스트합니다.
- 모니터 장착 틸트 장력을 확인하고 필요에 따라 조정합니다.
- 모니터 장착 암(장착된 경우)의 수직 움직임을 위한 스프링 장력을 확인하고 필요에 따라 조정합니다.
- 올바른 장력을 위한 모든 암 피벗 지점을 확인하고 필요에 따라 조정합니다.
- 암, 딜리버리 시스템, 트레이의 수평을 확인하고 필요에 따라 조정합니다.
- 잠금 장치를 검사하고 필요에 따라 조정합니다.
- 커버가 제대로 끼워졌는지 확인하고 필요에 따라 조정합니다.

기타(계속)

참고

- 캐스터 회전 및 가스 리프트 작동을 포함하는 스톨 작동을 확인하고, 이상한 소음을 확인합니다.
- 스톨 쿠션 상태를 확인합니다.
- 필요에 따라 페인트로 "금속까지 전달된" 스크래치를 손뽐니다.
- 직원이 장비의 모든 사용 설명서의 위치를 알고 있는지 확인합니다.
- 모든 필요한 수리에 대해 보고하고 필요에 따라 견적을 제공합니다.
- 필요한 경우 직원에게 올바른 유지 보수 및 작동에 대해 지시합니다.

검토

참고

- 필요에 따라 일상적인 유지 보수가 수행될 수 있도록 직원과 함께 A-dec의 장비 유지 보수 체크리스트(p/n 86.0600.09)를 검토합니다. 쿠션이 세척용 화학약품으로 인해 손상된 경우 고객에게 A-dec의 쿠션 유지 보수 안내서(p/n 86.0501.09)를 참조하게 합니다. 방금 살펴 본 체크리스트 항목을 이 예방 차원의 유지 보수 과정에서 언급합니다.

의사/병원:

주소:

치료실:

서비스 기술자:

서비스 날짜:

의사/고객과 검토함:

서명 및 날짜

의사/고객이 체크리스트를 검토하지 못함

추가 의견/
권장 사항:



A-dec 고객 본사

전화: 1.800.547.1883(미국/캐나다 내 지역)
전화: +1.503.538.7478(미국/캐나다 외 지역)

A-dec 중국

전화: +1.503.538.7478

A-dec 호주

전화: 1.800.225.010(호주 내 지역)
전화: +61.(0)2.8332.4000(호주 외 지역)

A-dec 영국

전화: 0800.ADEC.UK(2332.85)(영국 내 지역)
전화: +44.(0).24.7635.0901(영국 외 지역)