

Kontrol Listesi

A-dec Ekipmanları İçin Önleyici Bakım

A-dec önleyici bakım çalışmasını yıllık olarak veya 1500 saatlik klinik kullanımdan sonra yapmanızı önerir.

Koltuk

Notlar

- Dokunmatik paneli (mevcutsa) ve ayak pedalını (mevcutsa) kullanarak koltuk kaldırma, yatırma ve programlama işlevlerinin çalışmasını kontrol edin ve önerilen onarımlar veya parça değişimleri hakkında açıklama yapın.
- Tüm ekipman durdurma plakalarını/ anahtarlarını ve koltuk kilidi işlevini (mevcutsa) kontrol ederek doğru şekilde çalıştıklarından emin olun.
- Hareket aralığını kontrol edin ve çarpışma hasarı ihtimalini en aza indirmek için sınırları gereken şekilde ayarlayın.
- Hidrolik sıvı sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.
- Sıvı rezervuarı seviyesini kontrol edin ve gerekiyorsa doldurun.
- Hidrolik silindirde gıcırta ve başka bir alışılmadık ses (hidrolik hortumların kapaklara sürtünmesi gibi) olup olmadığını kontrol edin ve gereken ayarlamaları yapın.
- Tetiyer kaydırma çubuğunu kontrol edin ve gereken ayarlamaları yapın.
- Dönüş freninin (mevcutsa) çalışmasını kontrol edin ve gereken ayarlamaları yapın.
- Kolçak gerilimini (kullanılıyorsa) kontrol edin ve gereken ayarlamaları yapın.
- Döşemenin durumunu kontrol edin ve gerekirse parça değiştirmeyi önerin.

Tablet Sistemi

Notlar

- Başlık borularında hasar, gevreklik veya sertleşme olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse parça değiştirmeyi önerin.
- Başlık adaptörü O-halkalarının durumunu kontrol edin ve onarımla ilgili gereken şekilde açıklama yapın.
- Kumanda bloğu valfinin durumunu kontrol edin. Supap O-halkalarını her beş yılda bir veya gerektiğinde daha sık aralıklarla değiştirin.
- Başlık basınçlarını kontrol edin ve üreticinin teknik özelliklerine uygun şekilde basıncı ayarlayın.
- Fiber optik voltajlarını (mevcutsa) kontrol edin ve başlık üreticisinin teknik özelliklerine uygun şekilde ayarlayın.
- Yalnızca Continental tablet sistemi için: Kamçı kolunun hareketini kontrol edin ve gereken şekilde gerilimi ayarlayın.
- Başlık tutucu çubuğunun (kullanılıyorsa) gerilimini kontrol edin gereken ayarlamaları yapın.
- Şırınga O-halkalarını ve butonlu valf aksamalarını değiştirin, A-dec silikon yağ ile yağlayın ve çalıştıklarını doğrulayın.
- Başlık yıkama sisteminin çalışmasını kontrol edin.
- Hava freninin (mevcutsa) çalışmasını ve esnek kol yayının (mevcutsa) gerilimini kontrol edin ve gereken ayarlamaları yapın.

Tablet Sistemi (devamı)

- Yağ toplayıcıda yağ ve su birikmesini kontrol edin, gazlı bezi değiştirin ve gerekirse temizleyin.
- Bağımsız su şişesindeki pul contayı veya O-halkaları kontrol edin, gerekirse değiştirin, ardından halkaları A-dec silikon yağ ile yağlayın.
- Müşterinin dental ünitedeki su hattı bakım protokolünü ve en son yapılan su hattı testini inceleyerek koloni oluşturan birim (CFU) sayısının acil durum müdahale seviyesinin altında olduğundan emin olun. *A-dec Su Hattı Bakım Kılavuzu* (p/n 85.0983.15) belgesine bakarak müşteriye gereken şekilde açıklama yapın.

Ayak Kumandası

Notlar

- Ayak kumandası borusunun durumunu kontrol edin.
- O-halkayı ve trim halkasını inceleyin, gerekirse değiştirin, ardından halkaları A-dec silikon yağ ile yağlayın ve doğru şekilde çalıştıklarını kontrol edin.
- Diyaframı her beş yılda bir veya gerektiğinde daha sık aralıklarla değiştirin.
- Yalnızca kollu ayak kumandası için: Ayakları gerekirse temizleyin veya değiştirin.

Asistan Aletleri ve Vakum

Notlar

- Vakum borusunda hasar veya sızıntı olup olmadığını inceleyin ve gerekirse parça değiştirmeyi önerin.
- Borularda hasar veya gevreklik olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse parça değiştirmeyi önerin.
- Şırınga O-halkalarını ve butonlu valf aksamalarını değiştirin, A-dec silikon yağ ile yağlayın ve çalıştıklarını doğrulayın.
- Yüksek hacimli aspirasyon (HVE) ve tükürük emici O-halkalarını değiştirin, A-dec silikon yağ ile yağlayın ve doğru şekilde çalıştıklarını doğrulayın.
- Vakum kutusunda, borularda ve valf aksamalarında bulunan O-halkaları değiştirin. A-dec silikon yağ ile yağlayın ve doğru şekilde çalıştıklarını doğrulayın.
- Katı madde toplayıcı süzgecini inceleyin. Tek kullanımlık süzgeci değiştirin veya yeniden kullanılabilir süzgeci temizleyin ve gerekirse parça değiştirmeyi önerin.
- Katı madde toplayıcı kapağındaki O-halkayı ve bağlantı O-halkalarını kontrol edin ve gerekirse halkaları değiştirin.
- Amalgam ayırıcının monte edilmiş olduğu konumda çalışmasını (aynı zamanda amalgam seviyelerini) kontrol edin.
- Bir vakum sistemi temizleyicinin kullanıldığını kontrol edin ve gereken şekilde öneride bulunun.
- Alt destek kolu ve arka destek bağlantısı durdurma anahtarının (mevcutsa) çalışmasını kontrol edin.

Dental Işık

Notlar

- Koltuk ön ayar konumu kontrollerini kullanarak dental ışık otomatik açık/kapalı özelliğinin çalışması dahil olmak üzere açma/kapama anahtarının ve kontrollerinin çalışmasını kontrol edin.
- Tüm ışık şiddeti/mod ayarlarını ve kontrollerini kontrol edin.
- Yalnızca halojen ışıklar için: Geçiş anahtarının sağlam şekilde monte edildiğinden emin olun ve gerekirse tespit somununu sıkın.
- Işık kollarını kontrol ederek sağlam şekilde takıldıklarından emin olun.

Dental Işık (devamı)

Notlar

- Işık kalkanında çatlama ve aşınma olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse ürünü değiştirin.
- Işık başlığı aksamının tüm dönüş hareketi eksenlerindeki gerilimi kontrol edin ve gereken ayarlamaları yapın.
- Işık kolunun dikey hareketindeki yay gerilimini kontrol edin ve gereken ayarlamaları yapın.
- Dönüş sınırı durdurucularının yerlerinde olduğunu kontrol edin ve gereken ayarlamaları yapın.
- Yalnızca halojen ışıklar için: Yedek ampulün mevcut olduğunu kontrol edin.

Kreşuar

Notlar

- Borularda hasar veya gevreklik olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse parça değiştirmeyi önerin.
- Bardak doldurma ve kreşuar yıkama işlemlerinin çalışmasını ve sürelerini kontrol edin ve müşterinin tercihine göre gereken ayarlamaları yapın.
- Bardak doldurma ve kreşuar yıkama O-halkalarını inceleyin ve gerekirse O-halkaları değiştirin, ardından halkaları A-dec silikon yağ ile yağlayın.
- Gideri temizleyip yıkayın, doğru şekilde çalıştığını kontrol edin ve gider havalandırmasının çalıştığından emin olun.
- Kreşuar gider hattında sızıntı olup olmadığını kontrol edin ve onarımlarla ilgili gereken şekilde açıklama yapın.
- Kreşuar sınır anahtarının çalışmasını kontrol edin.

Zemin Kutusu

Notlar

- Hava ve su filtrelerini değiştirin.
- Hava ve su regülatörü diyaframlarını değiştirin.
- Gelen hava ve su basınçlarını kontrol edin ve gereken ayarlamaları yapın.
- Hava ve su sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.
- Borularda hasar, gevreklik veya sertleşme olup olmadığını kontrol edin.
- Gelen havayı kontrol ederek tablet sistemine temiz ve kuru hava iletiğinden emin olun. Zemin kutusu ve kompresördeki nem ayırıcıları kontrol edin ve gerekirse nem ayırıcı filtrelerini değiştirin.

Diğer

Notlar

- Tüm dokunmatik panel düğmelerinin çalışmasını test edin.
- Monitör kolunun eğim gerilimini kontrol edin ve gereken ayarlamaları yapın.
- Monitör kolu ek parçasının (mevcutsa) dikey hareketindeki yay gerilimini kontrol edin ve gereken ayarlamaları yapın.
- Koldaki tüm pivot noktaların geriliminin doğru olduğunu kontrol edin ve gereken ayarlamaları yapın.
- Kolların, tablet sisteminin ve tepsilerin hizalarını kontrol edin ve gereken ayarlamaları yapın.
- Bağlantı elemanlarını inceleyin ve gereken ayarlamaları yapın.
- Kapakları inceleyerek doğru şekilde yerleştirdiklerinden emin olun ve gereken ayarlamaları yapın.

Diğer (devamı)

Notlar

- Tekerleklerin dönüşü ve gazlı yükseltme hareketi dahil olmak üzere taburenin çalışmasını, ayrıca taburede alışılmadık sesler olup olmadığını kontrol edin.
- Tabure döşemesinin durumunu kontrol edin.
- Gerekli olan yerlerde "metale kadar inen" çizimleri boyayla giderin.
- Çalışanların ekipmanlara ait tüm Kullanma Talimatlarının yerlerini bildiğinden emin olun.
- Yapılması gereken tüm onarımları bildirin ve onarımlar için geçerli olan fiyatları belirtin.
- Gerekirse çalışanlara doğru bakım ve çalıştırma işlemlerini anlatın.

İnceleme

Notlar

- A-dec'in *Ekipman Bakım Kılavuzunu* (p/n 86.0600.15) çalışanlarla birlikte inceleyerek rutin bakım işlemlerinin gereken şekilde yapıldığından emin olun. Temizlik kimyasalları nedeniyle döşeme zarar görmüşse, müşteriden A-dec'in *Döşeme Bakım Kılavuzunu* (p/n 86.0501.15) incelemesini isteyin. Bu önleyici bakım çalışmasının bir parçası olarak, henüz tamamlamış olduğunuz kontrol listesi öğeleriyle ilgili açıklama yapın.

Hekim / Klinik: _____

Adres: _____

Muayenehane: _____

Servis Teknisyeni: _____

Servis Tarihi: _____

Hekimle / müşteriyle birlikte incelendi:

İmza ve Tarih

Hekim / müşteri kontrol listesini incelemek için müsait değil

İlave Yorumlar /
Öneriler:



A-dec Genel Merkezi

Tel: 1.800.547.1883 ABD/Kanada içinden
Tel: 1.503.538.7478 ABD/Kanada dışından

A-dec Çin

Tel: +1.503.538.7478

A-dec Avustralya

Tel: 1.800.225.010 Avustralya içinden
Tel: +61 (0)2 8332 4000 Avustralya dışından

A-dec Birleşik Krallık

Tel: 0800.ADEC.UK (2332.85) Birleşik Krallık içinden
Tel: +44.(0).24.7635.0901 Birleşik Krallık dışından

86.0643.15 Rev B
Telif Hakkı 2016 A-dec Inc.
Tüm hakları saklıdır.