


KULLANMA
TALİMATLARI

A-dec 300

TABLET SİSTEMLERİ

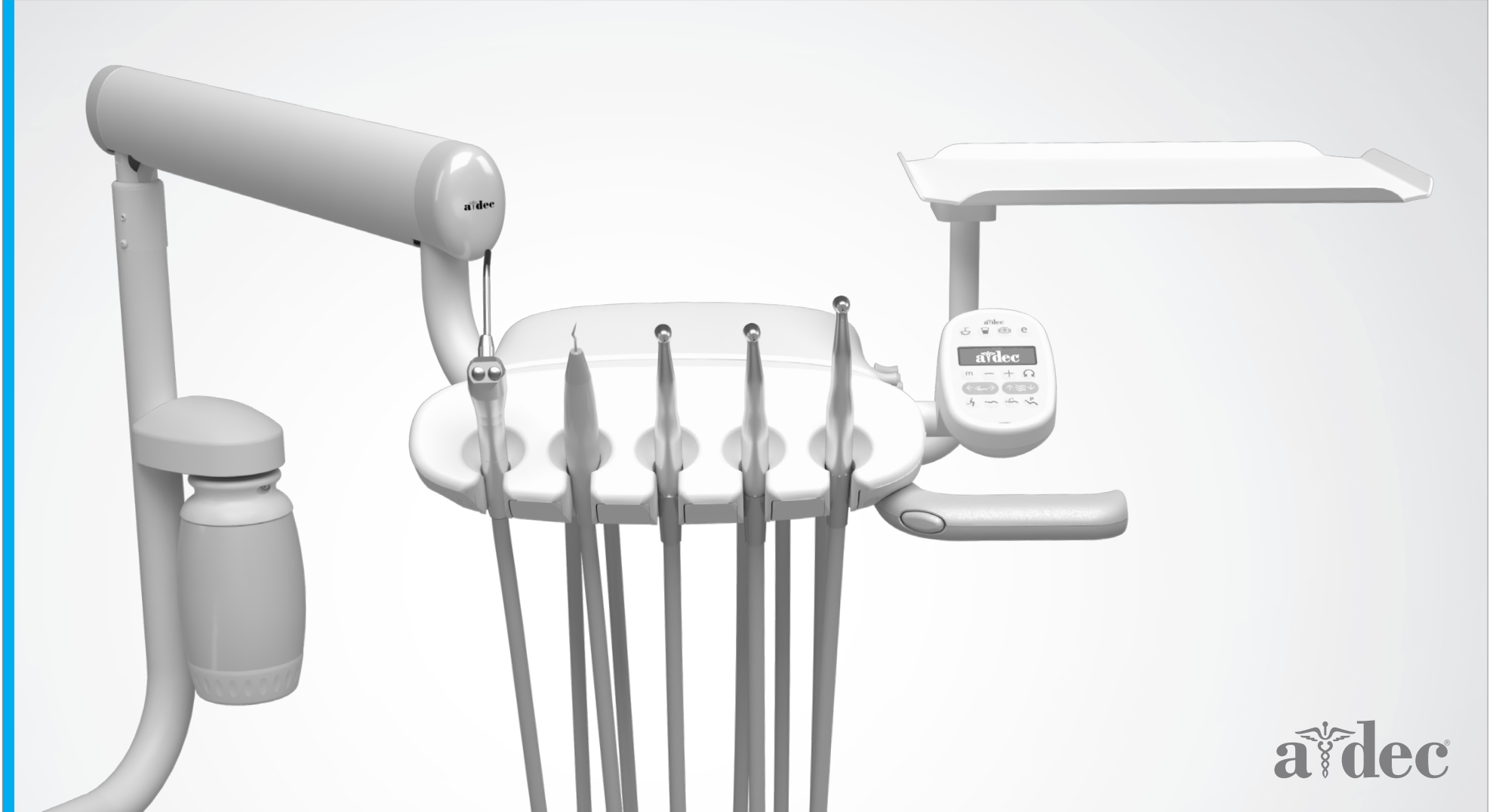

a|dec®

Telif Hakkı

© 2021 A-dec Inc. Tüm hakları saklıdır.

A-dec Inc., pazarlanabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk örtük garantileri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu materyal ile ilgili herhangi bir garantide bulunmaz. A-dec Inc., burada yer alan hatalardan veya bu materyalin kurulmasından, performansından veya kullanımından doğan sonuçsal veya diğer hasarlardan ötürü sorumlu olmayacaktır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bilgi verilmeksizin değiştirilebilir. Bu belge ile ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen bu sorunları bize yazılı olarak bildirin. A-dec Inc. bu belgenin hatasız olduğunu garanti etmez.

Bu belgenin hiçbir bölümü, A-dec Inc.'nin önceden yazılı izni olmadan fotokopi, kayıt veya herhangi bir bilgi depolama veya tutma sistemi dahil olmak üzere elektronik veya mekanik herhangi bir yöntemle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez veya aktarılamaz.

Ticari Markalar ve Ek Fikri Mülkiyet Hakları

A-dec, A-dec logosu, A-dec Inspire, Cascade, Century Plus, Continental, Decade, ICX, ICV, Performer, Preference, Preference Collection, Preference ICC, Radius ve reliablecreativesolutions, A-dec Inc.'nin ticari markalarıdır ve Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde tescillidir. A-dec 500, A-dec 400, A-dec 300, A-dec 200 ve EasyFlex de A-dec Inc.'ye ait ticari markalardır. Bu belgede yer alan ticari markaların veya ticari adların hiçbiri, ticari marka sahibinin açık ve yazılı onayı olmadan herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, kopyalanamaz veya değiştirilemez.

Bazı dokunmatik panel sembolleri ve simgeleri A-dec Inc. mülkiyetindedir. Bu sembollerin veya simgelerin A-dec Inc.'nin açık ve yazılı onayı olmadan tamamen veya kısmen kullanılması kesinlikle yasaktır.

Düzenleyici Bilgiler ve Garanti

Gerekli düzenleyici bilgiler ve A-dec garantisi için www.a-dec.com adresindeki Kaynak Merkezinde bulunan *Düzenleyici Bilgiler, Teknik Özellikler ve Garanti* belgesine (p/n 86.0221.15) bakın.

Ürün Servisi

Yerel yetkili A-dec bayinizden ürün servisi için hizmet alabilirsiniz. Servis bilgileri veya yetkili bayi bulmak için ABD ve Kanada'da 1.800.547.1883 numaralı hattan, dünya genelinde ise +1.503.538.7478 numaralı hattan A-dec ile iletişim kurun veya www.a-dec.com adresini ziyaret edin.

Bu Belgede Yer Alan Ürün Modelleri ve Versiyonları


Model	Versiyonlar	Açıklama
332/333 336/342	A	Tablet Sistemi
334/335	A/B	Tablet Sistemi

İçerik Haritası


Dokunmatik
Panel6




Ana Anahtar2

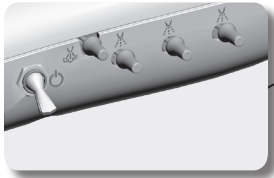


Yağ Toplayıcı 22

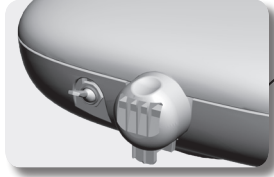

Tepsi Tutucu..... 19

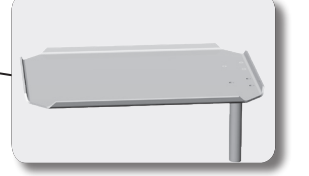

Esnek
Kol 5, 17, 20

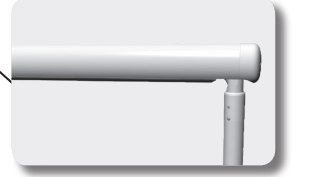



Su Şişesi 23



Çalıştırma / Ayarlama.....	2
Temizleme / Bakım	22
Teknik Özellikler.....	26

Çalıştırma/Ayarlama

Gücü Açma/Kapatma

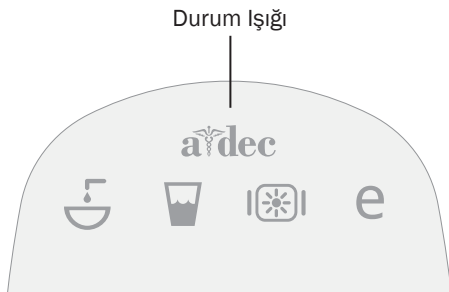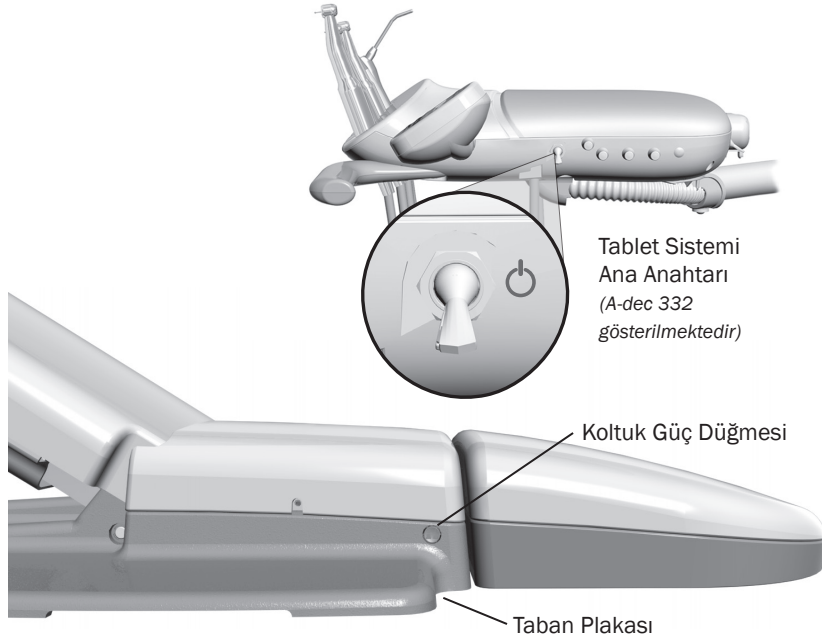

NOT A-dec, sistemi ilk kez kullanmadan önce dental ünit su hatlarına şoklama işlemi uygulamanızı önerir. Daha fazla bilgi için bkz. "Su Hattı Bakımı", sayfa 23.

Ana Anahtar

Sistemin havasını, suyunu ve gücünü açmak için ana anahtarı kullanın. Sisteme güç gelmiyorsa, koltuk üzerindeki güç düğmesine basıldığını doğrulayın. Ana anahtarın sistem gücünü kontrol edebilmesi için bu düğmenin açık olması gerekmektedir.

Güç Ne Zaman Kapatılmalıdır?


Enerji tasarrufu sağlamak ve hava kaçağı olasılığını azaltmak için, günün sonunda veya ürün uzun süre kullanılmayacağı zaman güç düğmesine basarak gücü kapatın.

Dokunmatik Paneller ve Durum Işığı

Sistem açık ve kullanıma hazır olduğu zaman dokunmatik panel üzerindeki A-dec logosu yanar. Durum ışığı yanıp sönüyorsa, bir güvenlik özelliği koltuk hareketini durdurmuş olabilir. Daha fazla için bkz. "Koltuk Güvenlik Özellikleri", sayfa 3.

Dokunmatik panel işlevi hakkındaki ayrıntılı bilgiler için bkz. "Dokunmatik Panel Kontrolleri", sayfa 6.

Koltuk Güvenlik Özellikleri

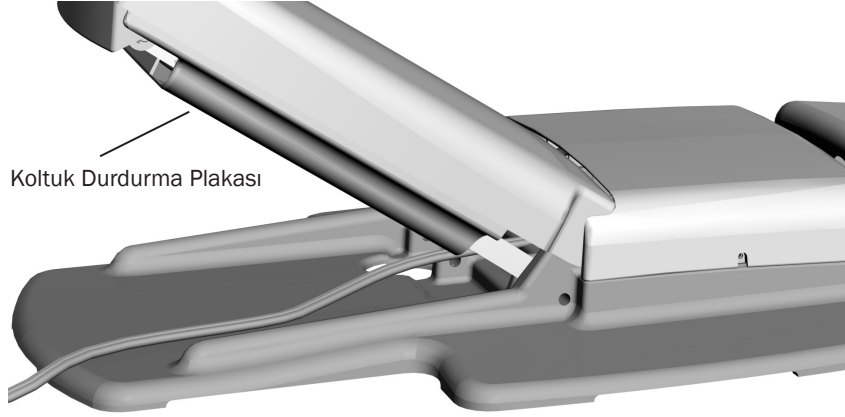


A-dec dental koltuklarda ve sistemlerde, koltuğun hareketini durdurabilecek veya engelleyebilecek güvenlik özellikleri (koltuk durdurma plakası gibi) bulunur. Bu özellikler aşağıdakilere bağlı olarak devreye girebilir:

- Koltuğun veya takılı modülün altında bir engellenme olduğunda.
- Ayak kumandası diskine veya koluna basıldığında.
- Bir başlık tutucusuna düzgün olarak oturmadığında.

Koltuk Beklenmedik Şekilde Durursa veya Hareket Etmezse

Yukarıdaki durumların tümünü kontrol edin ve düzeltin. Koltuk hareketini bloke eden bir engelleme varsa, koltuğu yükseltmek için dokunmatik paneli veya ayak pedalını kullanın, ardından engele neden olan nesneyi kaldırın.

Otoklavlanabilir Şırınga


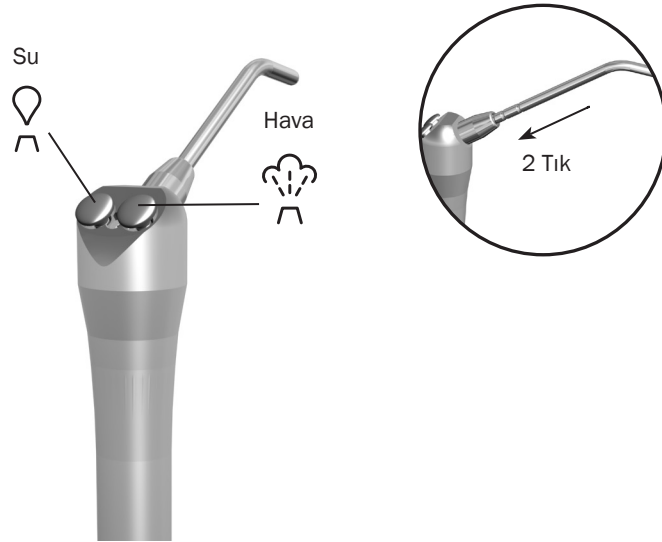


A-dec şırınga ucunu monte etmek için, iki tık hissedene kadar ucu ittin. Su/hava püskürtme için iki düğmeye de aynı anda basın.



ÖNEMLİ Şırınga kullanımı ve bakımı hakkında daha fazla bilgi için, A-dec şırınganızın Kullanma Talimatlarına bakın.

Başlığın Etkinleştirilmesi ve Çalıştırılması

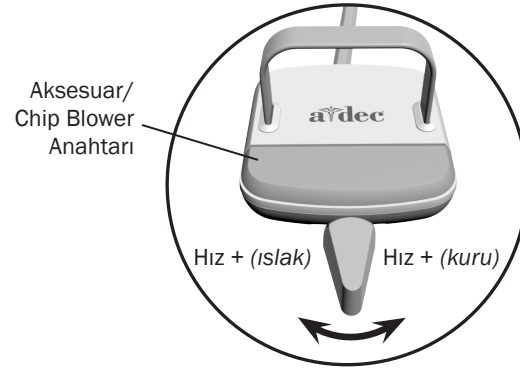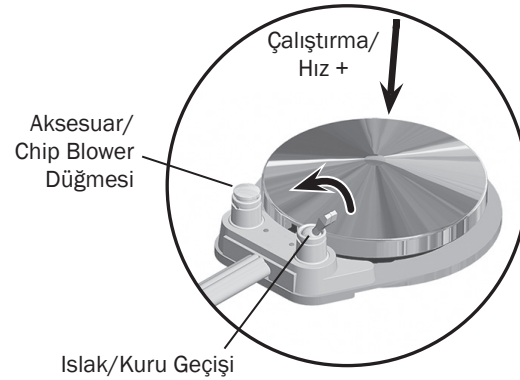

Bir başlığı etkinleştirmek için tutucusundan kaldırın veya kamçıyı ileri doğru çekin. İstenen başlık çalışmasını gerçekleştirmek için ayak pedalını kullanın.

Kontrol	Çalıştırma	Prosedür
Disk Ayak Kumandası	Bir başlığı çalıştırır.	Diske basın. Hızı yükseltmek için aşağıya doğru itin.
	Bir başlığı soğutucu suyla veya soğutucu su olmaksızın çalıştırır.	Islak/kuru geçişini ıslak çalışma için mavi noktaya doğru veya kuru çalışma için mavi noktadan uzağa doğru çekin. Ardından diske basın.
	İsteğe bağlı aksesuarı veya chip blower'ı çalıştırır.	Aksesuar/chip blower düğmesine basın.*
	Ağız içi kamerayı çalıştırır.	Bir görüntü yakalamak için diske baskın.*
Kollu Ayak Kumandası	Bir başlığı soğutucu suyla çalıştırır.	Kolu sola çekin. Hızı artırmak için daha uzağa doğru çekin.
	Bir başlığı soğutucu su olmadan çalıştırır.	Kolu sağa çekin. Hızı artırmak için daha uzağa doğru çekin.
	İsteğe bağlı aksesuarı veya chip blower'ı çalıştırır.	Aksesuar/chip blower anahtarına basın.*
	Ağız içi kamerayı çalıştırır.	Bir görüntü yakalamak için kolu sola veya sağa hareket ettirin.*


* Entegre A-dec aksesuarlarımızın çalışması ve konfigürasyonu ile ilgili sorularınız için yetkili A-dec satıcımızla iletişim kurun.

Başlık soğutucusu ayarlamaları için bkz. sayfa 15.



NOT Kollu ayak kumandası işlevi bir teknisyen tarafından ters çevrilebilir (sol yön kuru sağ yön ıslak olacak şekilde). Daha fazla bilgi için yetkili A-dec satıcımızla iletişim kurun.

Tablet Gövdesi Konumlandırması

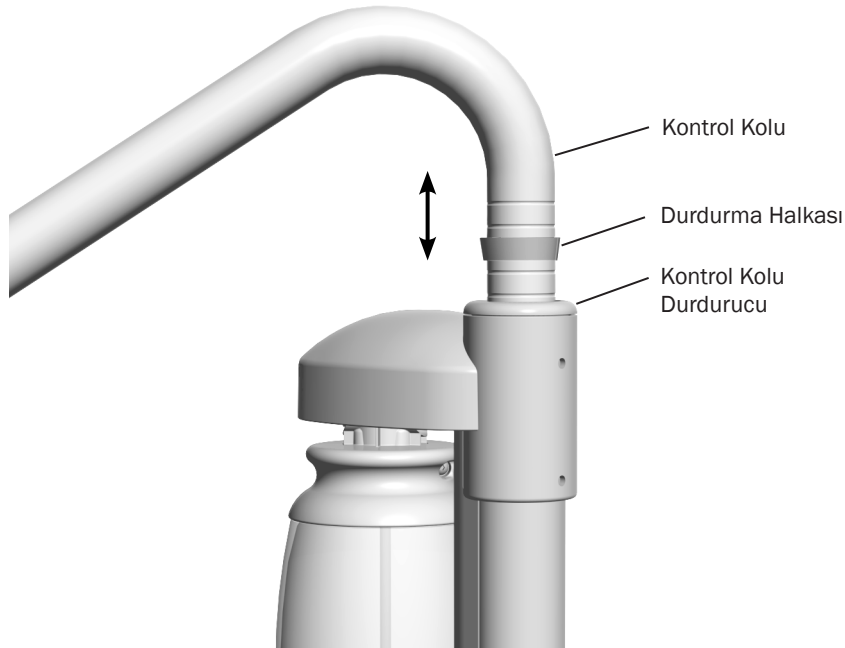

Esnek Kol Freni (332/333/334/335 tablet sistemleri)

Dengelenmiş bir esnek kol bulunan sistemlerde, entegre bir fren tablet gövdesinin dikey konumunun korunmasını sağlar (1,8 kg [4 lb] ilave ağırlıkla birlikte). Fren yanlara hareketi kısıtlamaz. Tablet gövdesi yüksekliğini ayarlamak için:

1. Tablet gövdesini konumlandırırken freni devreden çıkarmak için düğmeyi basılı tutun.
2. Freni etkinleştirmek için düğmeyi bırakın.

Manuel Yükseklik Ayarlama (yalnızca 336 tablet sistemi)

Manuel yükseklik ayarı özelliğine sahip sistemlerde tablet gövdesi yüksekliğini ayarlamak için:

1. Kontrol kolunu yukarı kaldırın.



NOT Kontrol kolunun yükseklik ayarlama aralığı 127 mm' dir (5 inç).

2. Durdurma halkasını istenen yükseklik oluşuna kaydırın.
3. Kontrol kolunu ve durdurma halkasını, kontrol kolu durdurucuya indirin.


Dokunmatik Panel Kontrolleri




A-dec dokunmatik paneli ve ayak pedalı, koltuk hareketini aynı şekilde kontrol eder. Ayak pedalı kontrollerinizle ilgili ayrıntılı bilgiler için, dental koltuğunuzun Kullanma Talimatlarına bakın.

Temel Dokunmatik Panel İşlevleri

A-dec 300 sisteminizde bir standart veya deluxe dokunmatik panel ya da her ikisi de bulunabilir. Standart dokunmatik panel koltuğu, kreşuarı ve dental ışık işlevlerini çalıştırır. Deluxe dokunmatik panel, elektrikli mikromotorlar ve diğer entegre klinik cihazlar için işlevler ekler. Her iki dokunmatik panel de manuel ve programlanabilir kontroller sağlar.

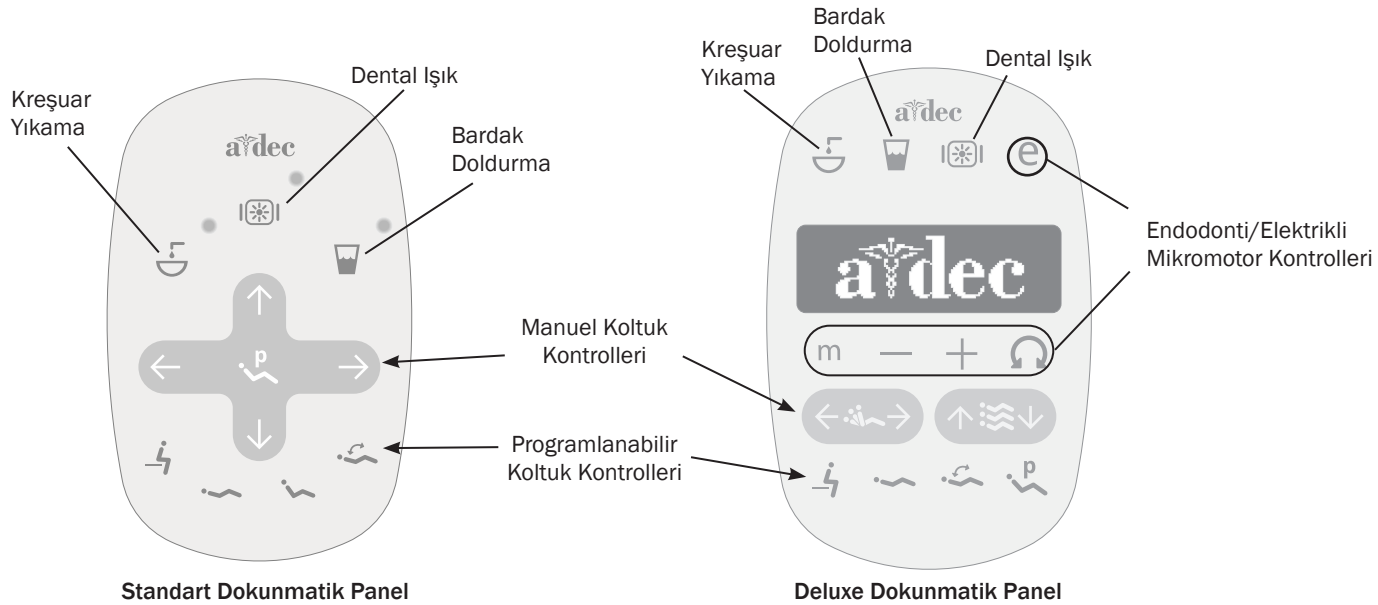

Dokunmatik Panel Kontrolleri (devamı)

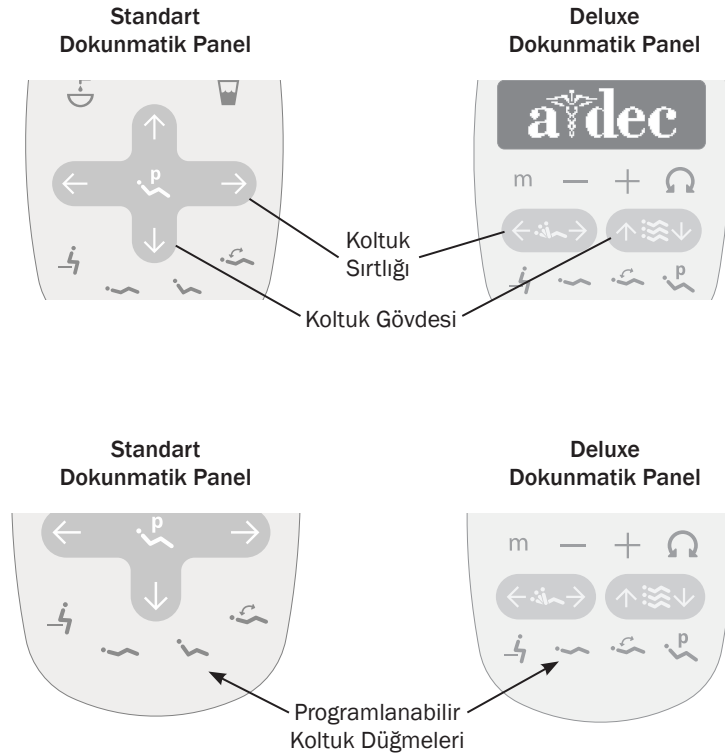


UYARI Manuel veya programlanabilir koltuk kontrollerini kullanmadan önce hastanın güvenli bir şekilde yerleştiğinden emin olun. Koltuk hareket ederken hastayı asla yalnız bırakmayın. Küçük çocuklar ve kısıtlı hareket edebilen hastalar söz konusu olduğunda daima ekstra dikkat gösterin.

Ön ayarlı hareket sırasında koltuğu herhangi bir noktada durdurmak için ayak pedalı veya dokunmatik panel üzerindeki herhangi bir koltuk konumlandırma düğmesine basın.

Manuel Koltuk Kontrolleri

Koltuk istenen konuma gelene kadar bir ok düğmesini basılı tutun. Yatay oklar koltuk sırtlığını yükseltir ve alçaltır. Dikey oklar koltuk gövdesini yükseltir ve alçaltır.

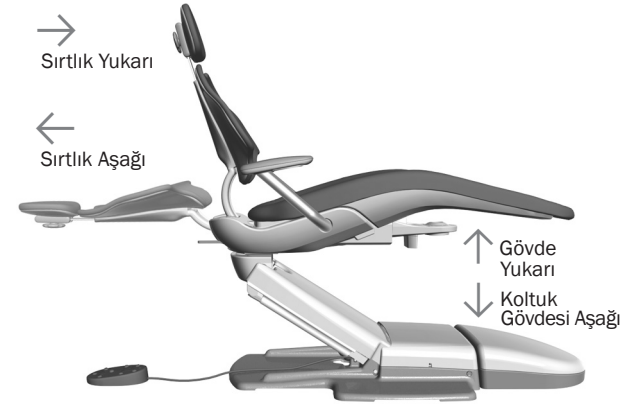



Programlanabilir Koltuk Kontrolleri

Koltuğu bir ön ayar konumuna getirmek için programlanabilir düğmelerden birine basın ve bırakın. Bu düğmeler fabrikada aşağıdaki şekilde programlanır:

Simge Pozisyon	Fabrika Ayarı
	Giriş/Çıkış Koltuğu hasta girişi/çıkışı için konumlandırır.
	Tedavi 1 Koltuk gövdesini ve sırtlığı aşağı indirir.
	Tedavi 2 Koltuk gövdesini aşağı indirir ve sırtlığı kısmen yukarı kaldırır (yalnızca standart dokunmatik panel).
	Röntgen/ Yıkama Koltuğu röntgen ya da yıkama konumuna getirir. Koltuğu bir önceki konuma getirmek için düğmeye tekrar basın.

Not: Dokunmatik panel sembolleri A-dec Inc. şirketinin mülkiyetindedir.

Dokunmatik Panel Kontrolleri (devamı)

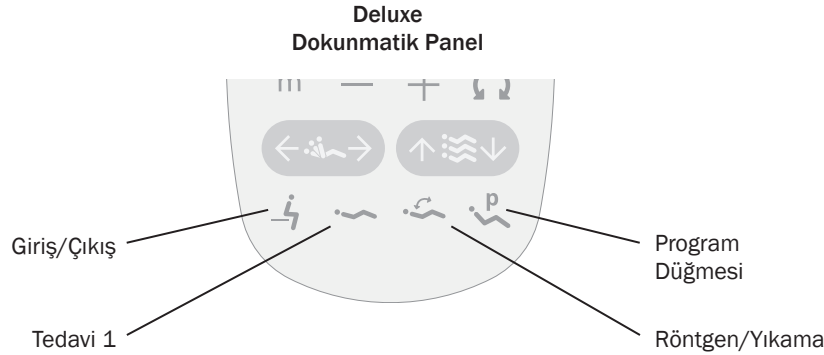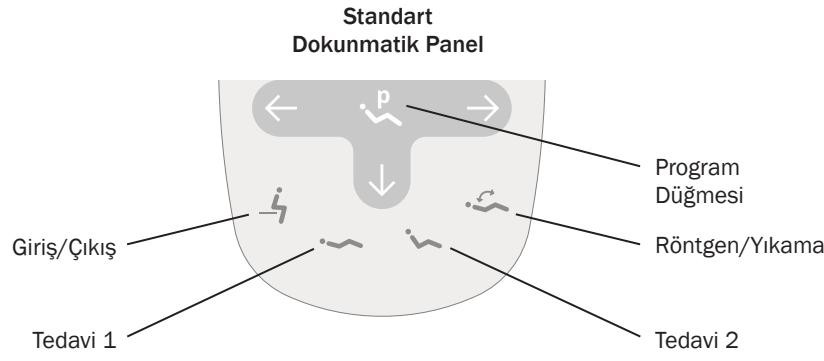

Giriş/Çıkış, Tedavi 1 ve 2* Düğmelerini Yeniden Programlama

Giriş/çıkış ve tedavi düğmelerine (⚡, ~, ~*) atanmış fabrika ön ayarlı koltuk konumlarını değiştirmek için:

1. Manuel kontrolleri kullanarak koltuğu istediğiniz şekilde konumlandırın.
2. P düğmesine basın ve bırakın. Bir bip sesi programlama modunun açık olduğunu ifade eder.
3. Beş saniye içerisinde yeniden programlamak istediğiniz koltuk konumu düğmesine basın (örneğin ⚡ düğmesine basın). Üç bip sesi, yeni ayarın belleğe programlandığını onaylar.

*Not: Deluxe dokunmatik panelde Tedavi 2 düğmesi bulunmaz.



Röntgen/Yıkama Düğmesini Yeniden Programlama

Röntgen/yıkama düğmesi (·~), röntgen veya kreşuar erişimi için koltuğu ve hastayı yukarı kaldırmak üzere ön ayarlıdır. ·~ düğmesine ikinci kez basıldığında koltuk önceki konumuna geri döner.

·~ düğmesini, diğer programlanabilir ön ayarlı koltuk düğmelerine benzer şekilde yeniden programlayabilirsiniz. İşlevini değiştirmek için:

1. Üç saniye boyunca P ve ·~ düğmelerine aynı anda basılı tutun.
 - Bir bip sesi, ·~ düğmesinin programlanabilir ön ayarlı koltuk düğmesi olarak seçildiğini ifade eder.
 - Üç bip sesi, ·~ düğmesinin fabrika ön ayarı olan röntgen/yıkama işlevine (röntgen/yıkama işlevi ile önceki koltuk konumu arasında geçiş) konfigüre edildiğini ifade eder.
2. ·~ düğmesini programlanabilir bir düğme olarak yeniden programlayıp farklı bir koltuk konumu atamak istiyorsanız, yukarıda yer alan "Giriş/Çıkış, Tedavi 1 ve 2* Düğmelerini Yeniden Programlama" bölümündeki adımları takip edin.

Dokunmatik Panel Kontrolleri (devamı)

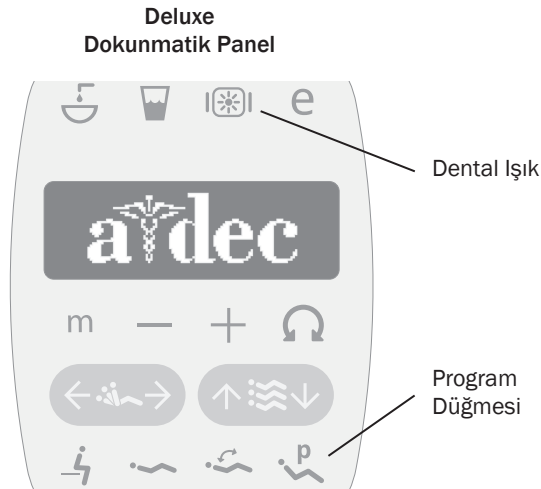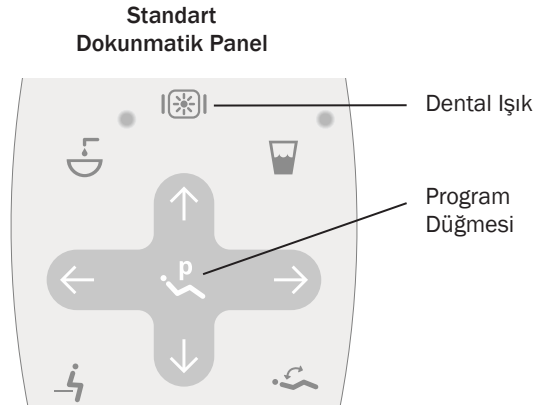

Dental Işık Otomatik Açık/Kapalı Özelliği

Koltuk bir tedavi ön ayar konumuna getirildiği zaman, otomatik açık/kapalı özelliği A-dec ışığını açar.

⚡ veya 🌊 düğmelerine bastığınızda, dental ışık kapanır ve koltuk ön ayarlı konuma hareket eder.


Otomatik açık/kapalı özelliğini devre dışı bırakmak için program düğmesini 🌊 ve ☀️ düğmesini aynı anda basılı tutun ve bir bip sesi duyana kadar üç saniye boyunca bekleyin.

Otomatik açık/kapalı özelliğini etkinleştirmek için 🌊 ve ☀️ düğmesini aynı anda basılı tutun ve üç bip sesi duyana kadar üç saniye boyunca bekleyin.



ÖNEMLİ Dental ışık işlevleri hakkında daha fazla bilgi için dental ışığınızın Kullanma Talimatlarına bakın.

Elektrikli Başlık Ayarları (yalnızca deluxe dokunmatik panel)

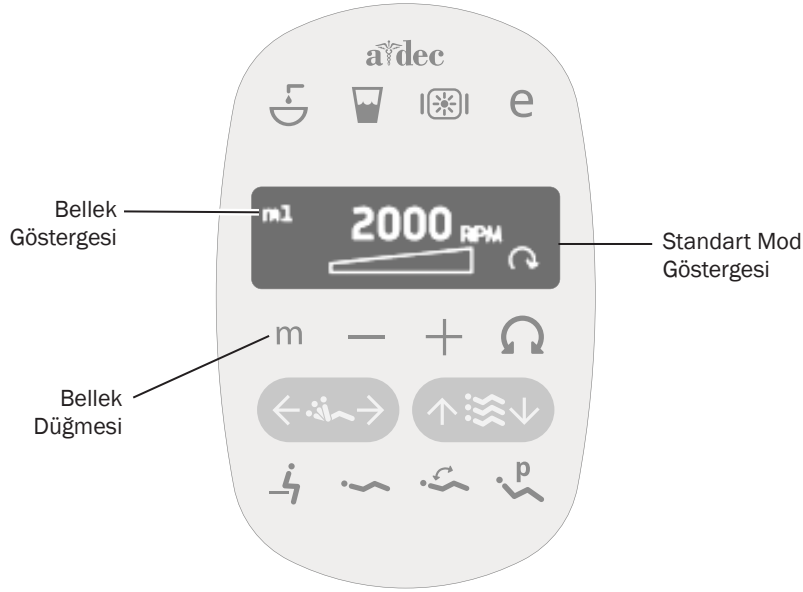

Standart Mod

Elektrikli mikromotoru etkinleştirmek için, başlığı tutucusundan kaldırın. Dokunmatik panel ekranında, söz konusu başlık konumu için kullanılan önceki ayarlar görüntülenir. Standart modda elektrikli mikromotor için dört adet fabrika ön ayar hızı bulunur:


Bellek Ayarı	Fabrika Ön Ayar Hızı
m1	2.000 rpm
m2	10.000 rpm
m3	20.000 rpm
m4	36.000 rpm

Bu bellek ayarlarını kendi özel ön ayar hızlarınıza göre yeniden programlayabilirsiniz. Her başlık için toplam sekiz özel ayar yapılması mümkündür (dördü standart modda ve dördü endodonti modunda).

Başlık ayarını programlamak için:

- İstediğiniz rpm ayarı dokunmatik panel ekranında görünene kadar **-** veya **+** düğmesine basın.
- Ayarı belleğe kaydetmek için **P** düğmesine basın. Bir bip sesi duyulur.
- m1 ile m4 arasındaki bellek ayarlarını görmek için **m** düğmesine basın. İstenen bellek ayarı gösterildiğinde **P** düğmesine basın. Üç bip sesi ayarı onaylar.

Elektrikli Başlık Ayarları (yalnızca deluxe dokunmatik paneller) (devamı)

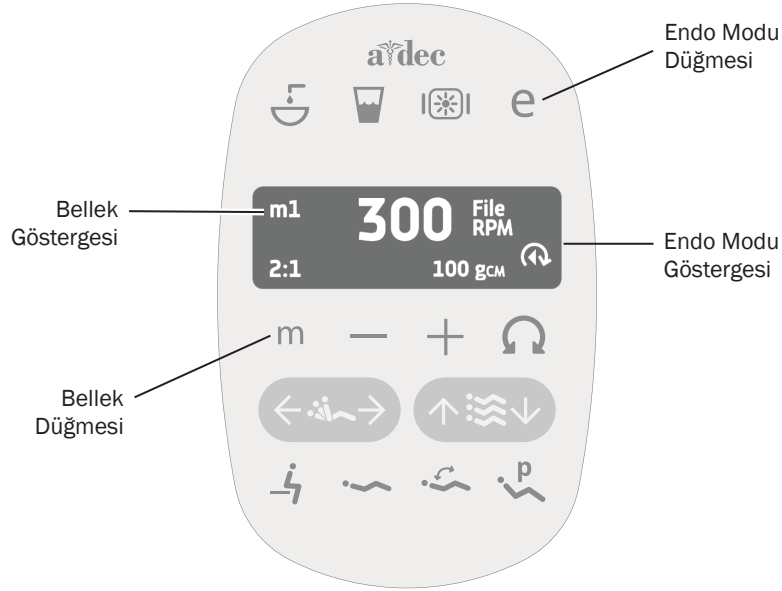



Endodonti (Endo) Modu

Başlık hızının ayarlanmasının yanı sıra, endo modu sayesinde belirli bir eğeye ve istenen başlık davranışına göre bir dizi ayar yapabilirsiniz. Dokunmatik panel ekranı üzerindeki simgeler ayarları yansıtır.



NOT Belirli bir eğe için hız ve tork sınırları hakkında daha fazla bilgi almak için eğe üreticisine danışın.


Başlık ayarını programlamak için:

1. Başlığı tutucudan kaldırın.
2. Dokunmatik panel ekranında endo modu görünmezse, **e** düğmesine basın.
3. Endo modundaki ayarları değiştirmek için **-** veya **+** düğmesine basın. Dokunmatik panel ekranında beyaz renkli ve ters bir video kutusu görüntülenir.
4. Dokunmatik panel ekranında ayarlar arasında geçiş yapmak için koltuk konumlandırma düğmelerini kullanın.
5. Ayarı istendiği gibi değiştirmek için **-** veya **+** düğmesine basın.
6. Hız sınırını, tork sınırını veya oranı belleğe ayarlamak için  düğmesine basın. Bir bip sesi duyulur.
7. **m1** ile **m4** arasındaki bellek ayarlarını görmek için **m** düğmesine basın. İstenen bellek ayarı gösterildiğinde  düğmesine basın. Üç bip sesi ayarı onaylar.

Elektrikli Başlık Ayarları (yalnızca deluxe dokunmatik paneller) (devamı)

Endo Modu Dokunmatik Panel Ekran Simgeleri

Simge	Ayar	Açıklama
	Hız	Eğre hız sınırı için ayarlama noktası. Daha fazla bilgi için eğre üreticimize danışın.
	Tork	Eğre tork sınırı için ayarlama noktası. Daha fazla bilgi için eğre üreticimize danışın.
	Tork Birimleri	Newton santimetre (N·cm) ve gram santimetre (g·cm) arasında geçiş yapar. Bu ayarın bir başlık için ayarlanması diğer tüm başlıkların ayarını da değiştirir. <i>Not: 1 N·cm = 102 g·cm.</i>
	Oran	Başlık oranını ayarlar. Daha fazla bilgi için başlık üreticimize danışın.
	Otomatik Modlar	Bu ayarın bir başlık için ayarlanması diğer tüm başlıkların ayarını da değiştirir. Otomatik mod göstergesi, ileri/geri göstergesinin içinde gösterilir.
	Otomatik Durdurma	<ul style="list-style-type: none"> Eğre tork sınırına eriştiği zaman, mikromotor kapanır.
	Otomatik Geri	<ul style="list-style-type: none"> Eğre tork sınırına eriştiği zaman, mikromotor durur ve yön değiştirir.
	Otomatik İleri	<ul style="list-style-type: none"> Eğre tork limitine eriştiği zaman mikromotor durur, yön değiştirir ve ardından tekrar ileri yöne gelir.

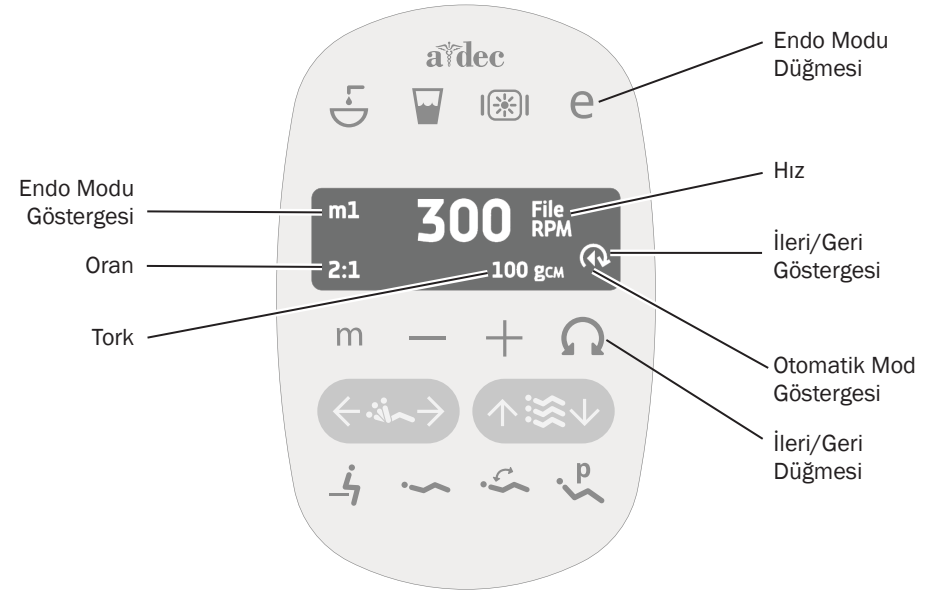

İleri/Geri Düşmesi

İleri/geri düşmesi, elektrikli mikromotorun yönünü değiştirir. Mikromotoru tutucuya geri yerleştirdiğinizde veya sistemi kapattığınızda, sistem varsayılan olarak ileri konuma gelir. Geri modunda ekran simgesi sürekli olarak yanıp söner.

Elektrikli Başlık Adaptive/Resiprokal Endo İşlevlerini Çalıştırma

Resiprokal Mod Ayarları

Simge	Ayar	Açıklama
	Resiprokal Modlar	Eğе, üzerine yük bininceye kadar döner. Eğе, üzerindeki yük kalkana dek resiprokal hareketi sürdürür ve ardından normal dönme hareketine devam eder. Ekrandaki resiprokal göstergesi, kullanılmakta olan modu gösterir. Bu ayarı değiştirdiğinizde, değişiklik tüm resiprokal ön ayarları için geçerli olur.
	TF Adaptive	<ul style="list-style-type: none"> Bu mod saat yönünde/sağa dönen Kerr® TF™ Adaptive hareketli eğeler içindir. Kerr TF Adaptive modu her zaman 8:1 oranına ayarlıdır.
	Eğе Resiprokal Sağ	<ul style="list-style-type: none"> Bu mod saat yönünde/sağa dönen resiprokal eğeler içindir. 8:1 oranının kullanılması önerilir. 3:1 ve 1:1 oranları da aynı zamanda kullanılabilir.
	Eğе Resiprokal Sol	<ul style="list-style-type: none"> Bu mod saat yönünün tersine/sola dönen resiprokal eğeler içindir. 8:1 oranının kullanılması önerilir. 3:1 ve 1:1 oranları da aynı zamanda kullanılabilir.



UYARI Resiprokal hareketle kullanılan eğenin 3 N-cm'lik tork kuvveti ve 600 rpm'lik (dk⁻¹) maksimum hız için onaylandığından emin olun.




NOT Eğе resiprokal hareketle çalışırken başlangıçta kesme yönünde döner ve ardından ters yönde resiprokal hareket gerçekleştirir. Resiprokal hareket motor üzerindeki yükü azaltır ve eğenin sıkışmasını önler. Geri yöndeki hareketle karşılaştırıldığında, kesme yönündeki hareket miktarı daha fazladır.



NOT A-dec en hassas tork deneyimi için KaVo® başlıklarının kullanılmasını önerir.

Kerr ve TF, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kerr Corporation'ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır ve başka ülkelerde de tescilli markaları veya tescilli ticari markaları olabilirler. KaVo, Amerika Birleşik Devletleri'nde KaVo Dental GmbH şirketinin tescilli ticari markasıdır ve başka ülkelerde de tescilli markası veya tescilli ticari markası olabilir.

Dokunmatik Panel Yardım Mesajları

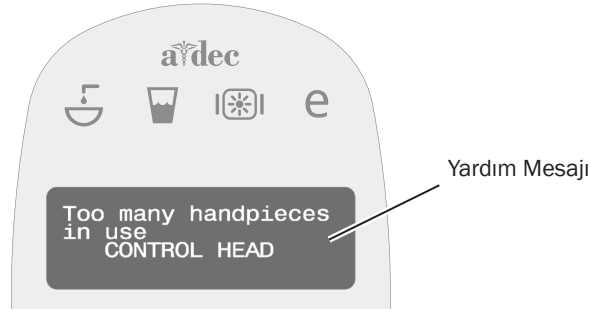

Diğer Başlık ve Aksesuar Ayarları

Deluxe dokunmatik panel ekranında devre dışı bırakılan işlemler için yardım mesajları gösterilir. Bir yardım mesajı görüntülediği zaman, servis uygulanması gerekebileceği için ekran mesajını ve yapmakta olduğunuz işlemi not alın. Yardım mesajları hakkında ayrıntılı bilgiler için www.a-dec.com adresindeki Kaynak Merkezinde bulunan *Düzenleyici Bilgiler, Teknik Özellikler ve Garanti* belgesine (p/ n 86.0221.15) bakın.



Aşağıdaki başlık ve aksesuar ayarlarından uygun olan herhangi birini değiştirmek için yetkili A-dec satıcınızla görüşün:

- **Auto-Off Delay** (Otomatik Kapatma Gecikmesi) – Ayak pedalının bırakılması durumunda başlık ışığının ne kadar süre açık kalacağını belirler. Varsayılan ayar 5 saniyedir.
Not: Bazı motor versiyonlarında bulunmayabilir.
- **On When Selected** (Seçildiğinde Açık) – Başlık, tutucudan kaldırıldığında başlık ışığının açılacağını mı yoksa kapalı kalacağını mı belirler. Varsayılan ayar açıktır.
- **On in Endo** (Endo Modunda Açık) – Endo modu seçildiğinde başlık ışığının açık veya kapalı olacağını belirler. Varsayılan ayar kapalıdır, ısının azaltılması ve ampul ömrünün uzatılması için bu ayar önerilir.
- **Ultrasonic Colors** (Ultrasonik Renkler) – Acteon ultrasonik aletler için renk kodlu uç kategorilerinin açık mı yoksa kapalı mı olacağını belirler. Varsayılan ayar açıktır.
- **Voltage Adjustment** (Voltaj Ayarı) – Her bir başlık konumu için özelleştirilmiş ışık verme voltajına olanak tanır. Varsayılan ayar 3,2 VDC'dir.


Başlık Soğutucu Ayarları



DİKKAT Bu prosedürü uygularken, su veya hava akışını tamamen kapatmayı denemeyin. Ayarlama kulpları akışı tamamen kapatacak şekilde tasarlanmamıştır ve çok fazla güç uygulamanız halinde kumanda bloğuna zarar verebilirler.

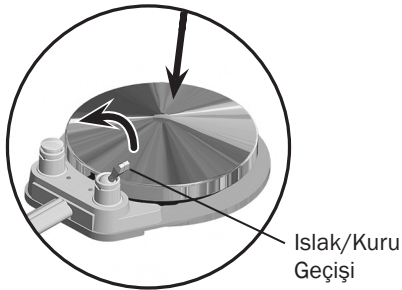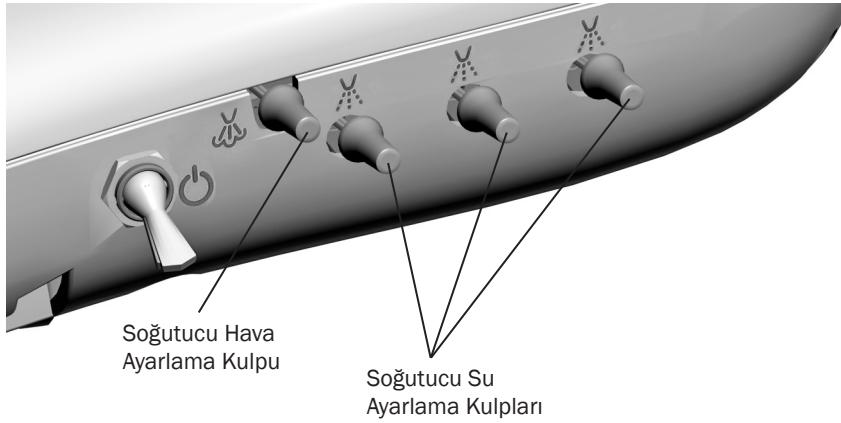

Disk Ayak Kumandası

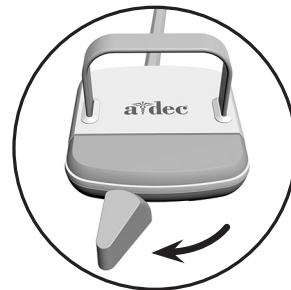

Kollu Ayak Kumandası

Tablet sisteminizdeki soğutucu hava kulpu, tüm başlık konumlarına giden hava akışını eş zamanlı olarak ayarlar. Her soğutucu su kulpu tek bir konuma giden su akışını ayarlar. İstedığınız başlığın soğutucu püskürtmesini ayarlamak için aşağıdaki prosedürü uygulayın:

1. Ayarladığınız her başlığa bir frez takın.
2. Soğutucu hava ayarlama kulpunu soğutucu akışı kesilene kadar saat yönünde çevirin.
3. Başlığı tutucudan kaldırın veya kamçıyı ileri doğru çekin ve aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
 - Disk ayak kumandasında: Islak/kuru geçişini suya getirin (mavi noktaya doğru) ve diske sonuna kadar bastırın.
 - Kollu ayak kumandasında: Kolu tamamen sola hareket ettirin.
4. Ayarlamakta olduğunuz başlık konumunun soğutucu su ayarlama kulpunu bulun ve soğutucu akışı kesilene kadar kulpu saat yönünde çevirin.
5. Başlık kafası üzerindeki her porttan su damlacıkları çıkana kadar soğutucu su ayarlama düğmesini saat yönünün tersinde yavaşça döndürün. Başlığı tutucuya geri koyun.
6. Her başlık için 3'ten 5'e kadar olan adımları tekrarlayın.
7. Sistem için soğutucu havayı ayarlamak için tutucudan bir başlık kaldırın veya kamçıyı ileri çekin.
8. Frezin kesme yüzeyinde istenen atomizasyonu elde edene kadar ayarlama düğmesini saat yönünün tersine çevirin.



DİKKAT Soğutucu hava yükselmeyi durdurduktan sonra soğutucu hava ayarlama düğmesini çevirmeye devam etmeyin. Aksi halde çubuk kumanda bloğundan dışarı çıkabilir.

9. Soğutucu su miktarının daha fazla olması gerekiyorsa, su çıkışını 5. adımda gereken şekilde artırın.

Başlık Hareket Havaı Ayarlamaları



Deluxe dokunmatik panel üzerinde hareket havaı basıncını — ve + düğmesine aynı anda basarak kontrol edebilirsiniz. Standart dokunmatik panel bulunan sistemlerde en doğru hareket havaı ölçümü için, başlık borusuna takılan bir başlık basınç göstergesi (A-dec p/n 50.0271.00) kullanın.


Hareket havaını her başlığa özel olarak ayarlamak için:

1. Tablet gövdesi kapağının vidalarını çıkarmak için 7/64 inç altıgen anahtar kullanın. Kapağı çıkarın ve içerideki hareket havaı basınç kontrollerini bulun.
2. Başlığı tutucudan kaldırın ve kamçıyı ileri doğru çekin.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Disk ayak kumandasında: Islak/kuru geçişini kuruya getirin ve diske sonuna kadar bastırın.
 - Kollu ayak kumandasında: Kolu tamamen sağa hareket ettirin.
4. Başlık çalışırken, deluxe dokunmatik panelde görüntülenen değeri veya başlık basıncı göstergesini kontrol edin.
5. Başlık hareket havaı basıncını üreticinin teknik özelliklerine uygun şekilde ayarlayın. Akışı azaltmak için kontrol çubuğunu saat yönünde ve akışı yükseltmek için saat yönünün tersinde çevirin.



DİKKAT Üreticinin önerilen hareket havaı basınç artışlarının aşılması hasar riskini yükseltir ve başlık parçalarının ömrünü belirgin şekilde kısaltabilir. Uygun hareket havaı basıncı için, başlık üreticisinin Kullanma Talimatlarına bakın.

Dönüş Ayarlamaları

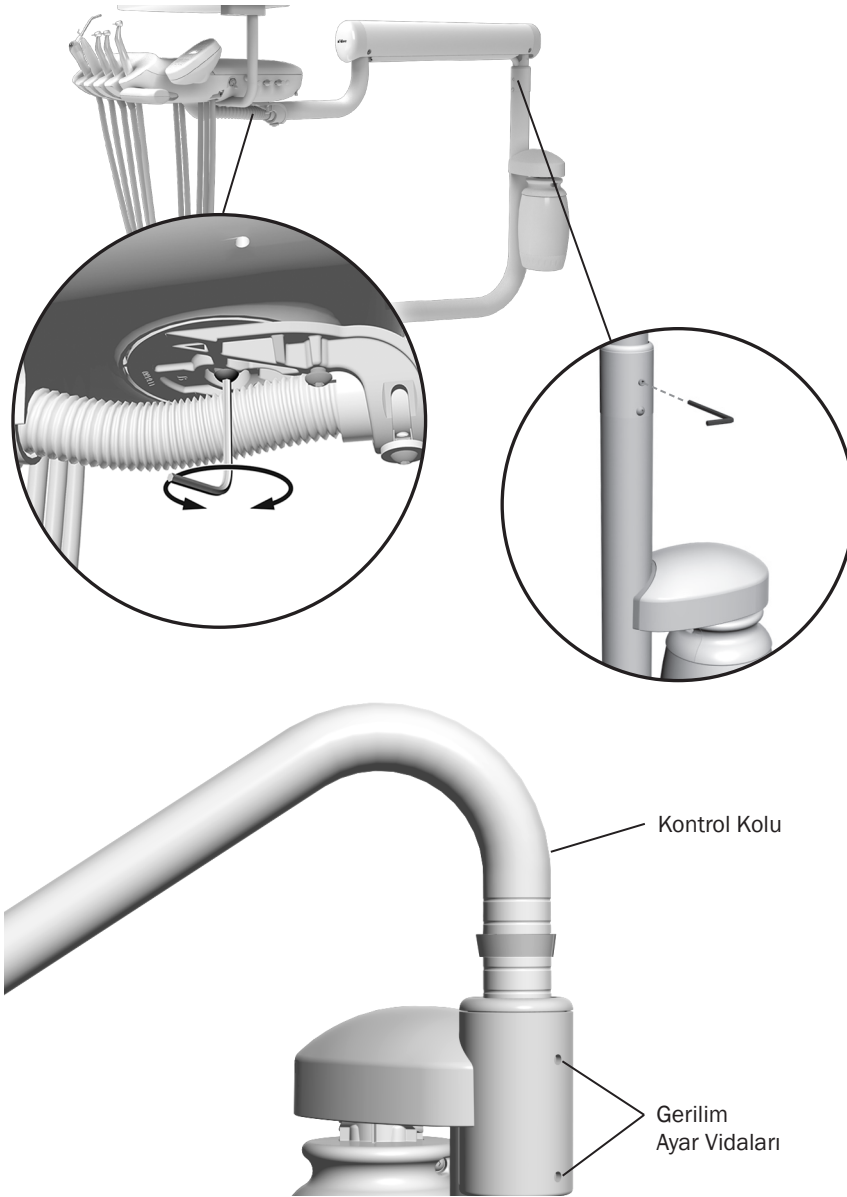

Tablet Gövdesi

Tablet gövdesi çok gevşekse veya zor döndürülüyorsa, 5/32 inç altıgen anahtar kullanarak tablet gövdesinin altındaki gerilim vidasını ayarlayın.


Esnek Kol (332/333/334/335 tablet sistemleri)

Tablet gövdesi sağa veya sola kaymaya başlarsa, 1/8 inç altıgen anahtar kullanarak ayar vidası gerilimini esnek kol dönüşüne uygun şekilde ayarlayın.

Kontrol Kolu (yalnızca 336 tablet sistemi)


Kontrol kolunu kaldırması veya döndürmesi zorsa ya da kol çok serbest dönüyorsa, iki gerilim ayar vidasını ayarlamak için 3/32 inç altıgen anahtar kullanın. Saat yönüne çevirdiğinizde gerilim artar.

Dönüş Ayarlamaları (devamı)

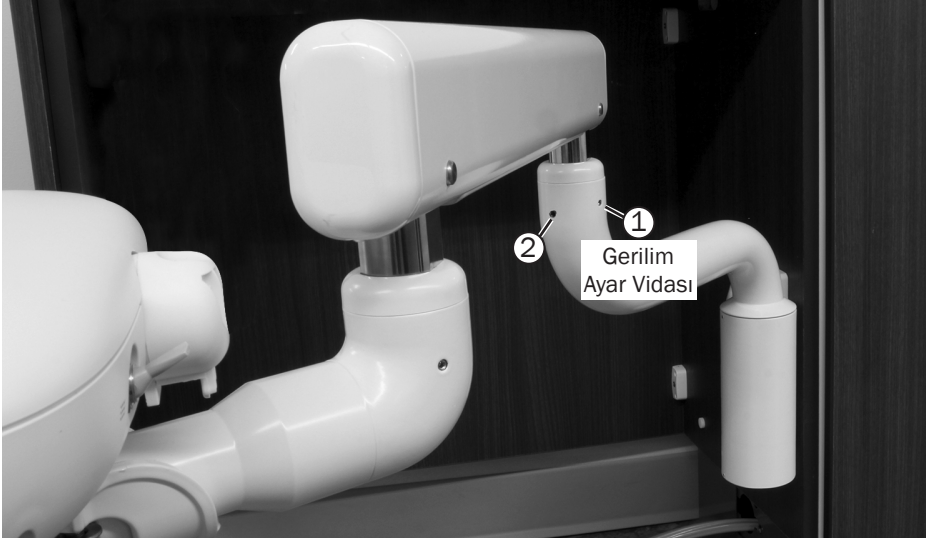

Esnek Kol (yalnızca 342 tablet sistemi)

1. Ayar vidası gerilimini ayarlamak için 3/32 inç altıgen anahtar kullanın. Kaymayacak kadar sıkı olmalıdır ancak hareket ettirmesi zor olacak kadar sıkı olmamalıdır.
Saat yönüne çevirdiğinizde gerilim artar.
2. Gerilim ayarlandıktan sonra, diğer vidayı sabit olana kadar sıkılamak için aynı altıgen anahtarı kullanın.

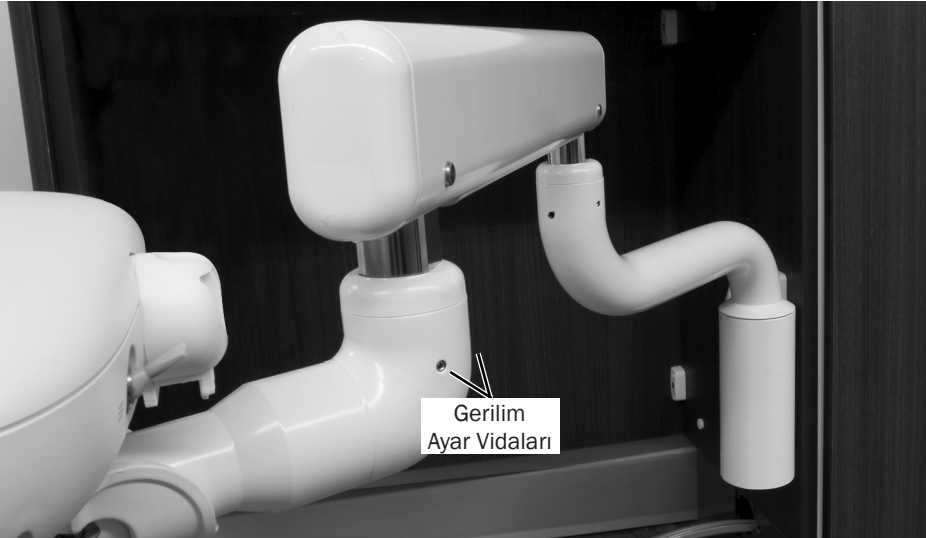


Kontrol Kolu (yalnızca 342 tablet sistemi)


1. İki gerilim ayar vidasını eşit şekilde ayarlamak için 3/32 inç altıgen anahtar kullanın.
Saat yönüne çevirdiğinizde gerilim artar.

Dönüş Ayarlamaları (devamı)

Traditional Sistem

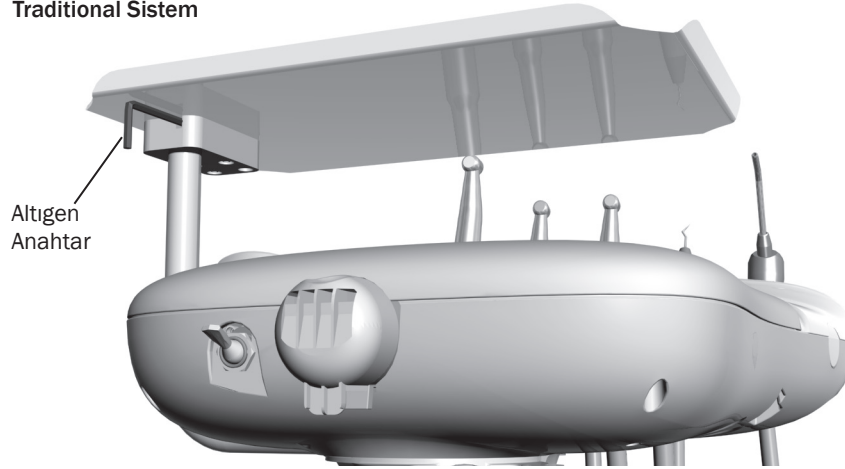

Continental Sistem

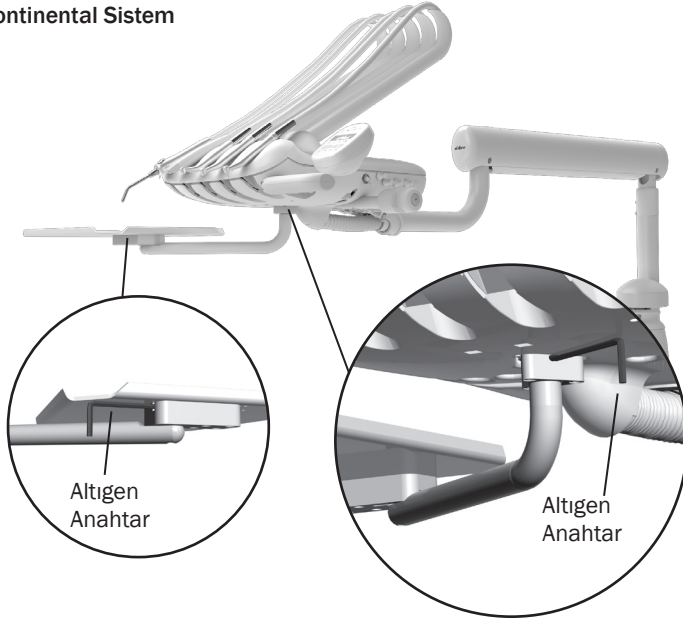


Tepsi Tutucu

Tepsi tutucu çok sıkı veya çok gevşek şekilde dönüyorsa, 9/64 inç altıgen anahtar kullanarak tepsi tutucu dönüşünü ayarlayın:

1. Altıgen anahtarı montaj braketinden sokun. Gerekirse, altıgen anahtar tamamen montaj braketine kayana kadar tutucuyu veya kolu döndürün.
2. Braketi sabit tutarken tepsi tutucuyu saat yönünde döndürerek gerilimi yükseltin veya saat yönünün tersinde döndürerek gerilimi azaltın.

Continental® stildeki tablet sistemleri için iki adet ayarlama konumu bulunur: tablet gövdesinin altında ve tepsi tutucunun altında.


Dikey Ayarlamalar (332/333/334/335 tablet sistemleri)

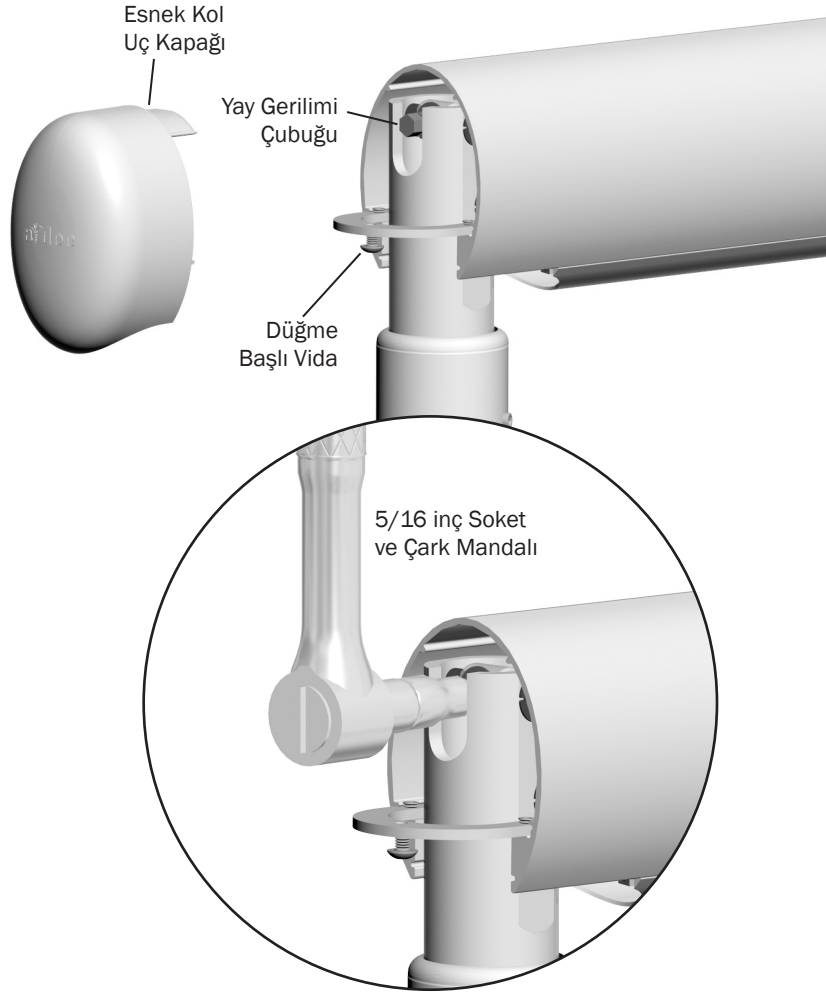

Ana güç anahtarını kapalı konuma getirdiğiniz zaman tablet gövdesi düşüyor veya hızla yukarı çıkıyorsa, esnek kol yayının gerilimini ayarlamak için şu adımları uygulayın:

1. Ana güç anahtarını açık konuma getirin.
2. Tablet gövdesini normal bir kullanıma göre yükleyin, başlıkları yerlerine takın ve tepsi tutucuya bir tepsi yerleştirin.
3. Esnek kol dengede olacak şekilde tablet gövdesini konumlandırın.
4. Tablet gövdesinden en uzaktaki uç kapağını sabitleyen düğme başlı vidayı gevşetmek için 1/8 inç altıgen anahtar kullanın, ardından kapağı düz bir şekilde çekin.
5. Ana güç anahtarını kapalı konuma getirin.
6. 5/16 inç soket ve çark mandalı kullanarak esnek kol gerilimi çubuğunu ayarlayın, uygun şekilde ayarlandığında ana güç anahtarını kapalı konuma getirdiğiniz zaman tablet gövdesi kademeli olarak yükselir.
 - Tablet gövdesi hızla yükseliyorsa, çubuğu saat yönünün tersine çevirin.
 - Tablet gövdesi düşüyorsa, çubuğu saat yönünde çevirin.

Esnek Kol Dengesi (yalnızca 342 tablet sistemi)

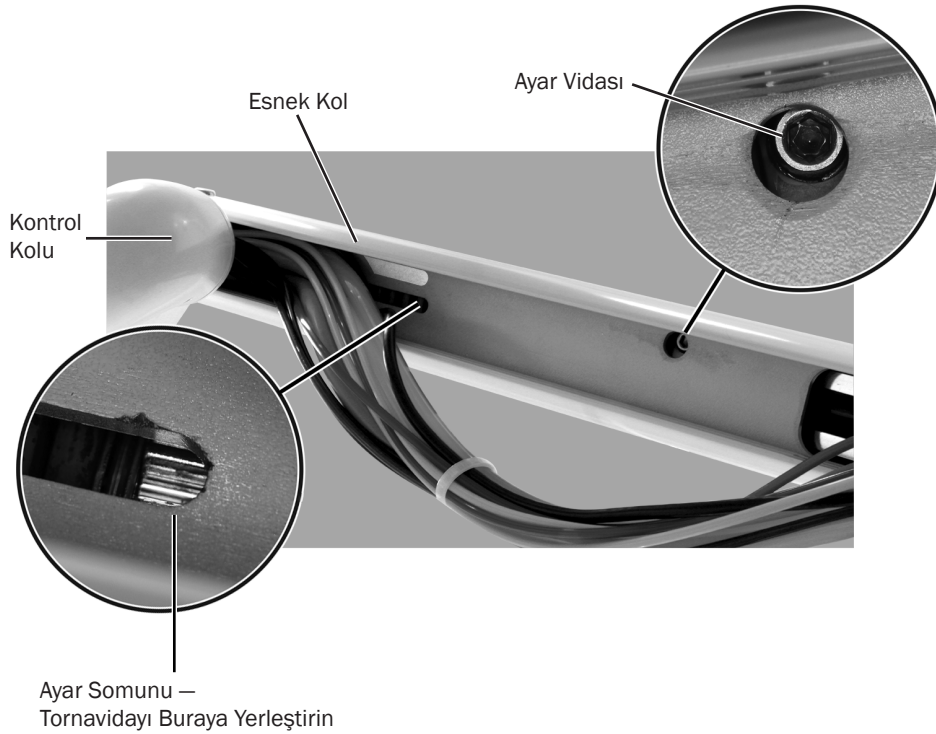


1. Tablet gövdesini normal kullanım için yükleyin. Başlıkları takın. Tepsi tutucu varsa, tepsi tutucuya üzerinde aletlerin bulunduğu bir tepsi yerleştirin.
2. Tablet gövdesini en alçak konuma getirin.
3. Tablet gövdesinin kayıp kaymadığını kontrol edin.
4. Esnek kolun altındaki kapağı çıkarın.
5. Esnek kolun alt tarafındaki borularda yeterli gevşekliğin olduğundan emin olun.
6. Aşağıdakilere erişmek için esnek kolu yukarı kaldırın:
 - **Ayar somunu:** Tablet gövdesinin ağırlığını dengeleyen yay.
 - **Ayar vidası:** Tablet gövdesinin dikey konumunu koruyan bir sürtünme mekanizması.
7. Dengeyi ayarlamak için, ayar somununa standart bir tornavidaya yerleştirin:
 - Tablet gövdesi yukarı kayarsa, somunu saat yönünün tersine döndürün.
 - Tablet gövdesi aşağı kayarsa, somunu saat yönüne döndürün.
8. Denge ayarlandıktan sonra, kolu tam yukarı ve tam aşağı konumlarına hareket ettin ve tablet gövdesini her bir konumda serbest bırakın. Esnek kol herhangi bir konumda kayıyorsa, ayar vidasını sıkmak için 5/32 inç altıgen anahtar kullanın.



DİKKAT Ayar vidasını aşırı sıkmayın, sürtünme mekanizmasına zarar verebilirsiniz.

Temizleme / Bakım

Başlık Boruları

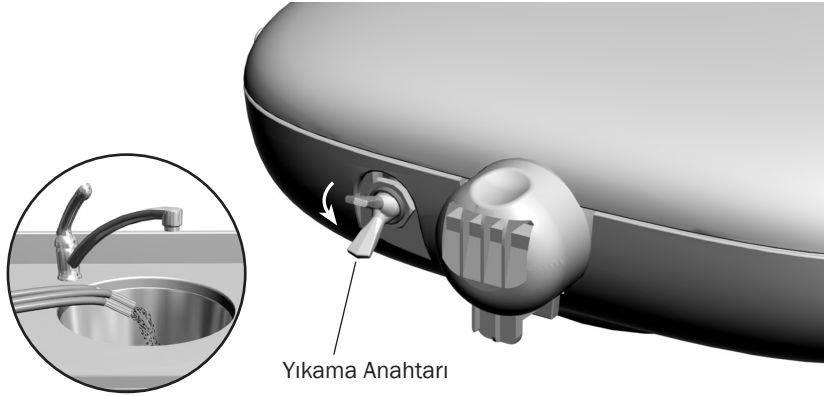


Başlık borularından yüksek hacimde su geçirmek için yıkama anahtarını kullanın. Her hastadan sonra boruyu yıkamak için:

1. Başlıkların bağlantılarını sökün.
2. Soğutucu su kullanan tüm başlık borusunu bir lavabonun, kreşuarın veya küvetin üzerinde tutun.
3. Yıkama anahtarını 20-30 saniye süreyle aşağı konumda tutun.



NOT Tüm başlık borularını (hava ve su hatları) bölgenizdeki düzenlemelere uygun olarak yıkayın. Herhangi bir düzenleme mevcut değilse, boruyu günün başında ve her hastadan sonra en az 20-30 saniye boyunca yıkayın.


Yağ Toplayıcı

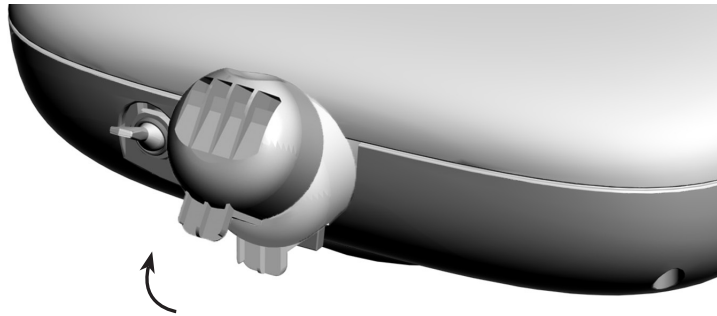

Tablet sistemindeki yağ toplayıcının bakımını normal kullanımda haftada bir kez, yoğun kullanımlarda ise daha sık şekilde yapın. Servis uygulamak için:

1. Yağ toplayıcının kapağını tablettan çıkarın ve eski gazlı bezi atın. Köpük susturucuyu çıkarmayın.
2. Yeni bir gazlı bezi (51 mm x 51 mm [2 inç x 2 inç]) dörde katlayarak kapağın içine yerleştirin.
3. Yağ toplayıcı kapağını kapalı hale getirin.

Bariyer Koruması

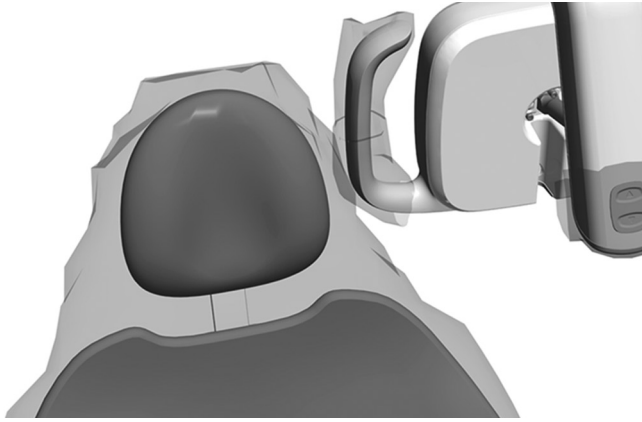

NOT Bariyerlerin düzgün şekilde kullanılması ve atılması için bariyer üreticisi tarafından sağlanan talimatlara bakın.

A-dec, kullanılan tüm temas ve transfer yüzeyleri için bariyer koruması önerir. Temas yüzeyleri elle temas edilen alanlardır ve dental prosedürler sırasında potansiyel çapraz kontaminasyon bölgelerine dönüşürler. Transfer yüzeyleri aletlerle ve canlı olmayan diğer nesnelere temas eden yüzeylerdir.

ABD’de, bariyerler ABD Gıda ve İlaç Dairesi (USFDA) tarafından belirtilen Güncel İyi Üretim Uygulaması (CGMP) kapsamında üretilmelidir. ABD dışındaki yerler için, bulunduğunuz bölgede geçerli olan tıbbi cihaz düzenlemelerine bakın.



ÖNEMLİ Temas ve transfer yüzeylerini temizleme ve dezenfekte etme hakkındaki öneriler için (bariyer korumasının olmadığı veya bariyerlerin zarar gördüğü durumlarda), lütfen *A-dec Ekipman Aseptisi Kılavuzuna* (p/n 85.0696.15) bakın.

Su Hattı Bakımı



Bağımsız
Su Şişesi

A-dec, sistemi ilk kez kullanmadan önce dental ünit su hatlarında şok uygulaması gerçekleştirmenizi önerir.


Sürekli su hattı bakımı için A-dec üç protokol önerir: A-dec ICX® su hattı tabletlerinin sürekli olarak kullanılması, düzenli dental ünit su takibi ve şoklama işlemi.



ÖNEMLİ Sisteminizdeki su kalitesinin iyi olmasını sağlama konusundaki ayrıntılar için ICX’in ve bağımsız su şişenizin Kullanma Talimatlarına bakın:

A-dec ICX p/n 86.0613.00
A-dec Bağımsız Su Sistemi p/n 86.0609.15
Su Hattı Bakım Kılavuzu p/n 85.0983.15

Fiber Optik Boru Ampulü

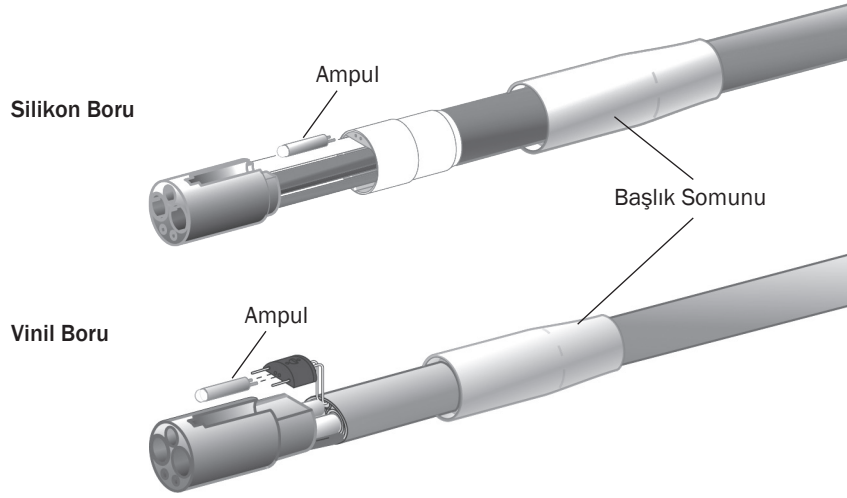


ÖNEMLİ Başlıklarınızdaki veya hızlı çıkarılabilen bağlantılardaki ampulleri değiştirmek için, başlığınızın Kullanma Talimatlarına bakın.

Fiber optik 5 delikli silikon veya vinil borunuzdaki ampulü değiştirmek için:

1. Başlığı ve hızlı bağlantı kuplajını borudan ayırın.
2. Metal başlık somununu geri çekin.
3. Başlık terminalinin metal parçasını geriye doğru kaydırın (sadece silikon boruda).
4. Ampulü değiştirin.
5. Terminalin metal parçasını plastik kısma yeniden sokun (sadece silikon boruda).
6. Başlık somununu terminal üzerine dikkatlice tekrar kaydırın.

Tesisata Erişim

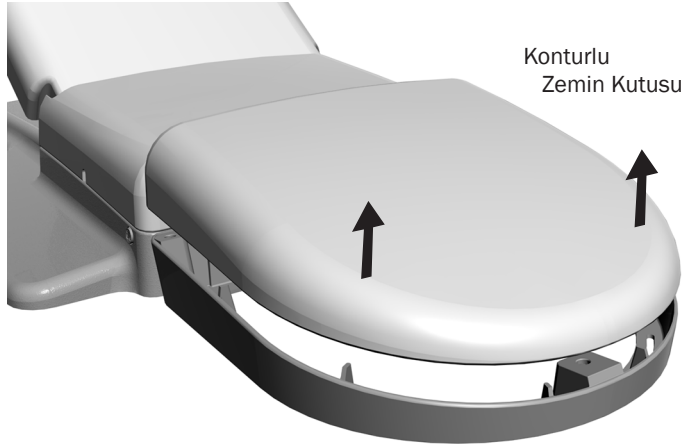

DİKKAT Kapağı çıkardığınızda veya yerine taktığınızda, herhangi bir tele veya boruya zarar vermemek için dikkatli olun. Yerine taktikten sonra kapağın sabit olduğunu doğrulayın.

Sistem tesisatı koltuğa monte sistemlerde (332/333/334/335/336) konturlu zemin kutusunda veya yan tarafa monte sistemlerde (342) dolap ya da uzak zemin kutusunda bulunur. Erişim için, zemin kutusu kapağını veya çıkarılabilir dolap panelini kaldırın. Bakım için yerel yetkili A-dec bayiniz ile iletişim kurun.

Teknik Özellikler

Sistem Aksesuar Yüğü

Maksimum aksesuar yüğü kapasitesi 1,8 kg (4 lb)
(entegre aksesuarlara ek olarak)



ÖNEMLİ Elektrikle ilgili teknik özellikler, sembollerin tanımları ve diđer düzenleyici gereksinimler için www.a-dec.com adresindeki Kaynak Merkezinde bulunan *Düzenleyici Bilgiler, Teknik Özellikler ve Garanti* belgesine (p/n 86.0221.15) bakın.



NOT Teknik özellikler önceden bildirim yapılmaksızın deđiştirilebilir. Gerekli koşullar bulunduđunuz yere göre deđişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için yetkili A-dec satıcınızla bağlantı kurun.

Burada adı geçen tüm ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.



A-dec Genel Merkezi

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132
Amerika Birleşik Devletleri
Tel: 1.800.547.1883 ABD/Kanada içinden
Tel: +1.503.538.7478 ABD/Kanada dışından
Faks: 1.503.538.0276
www.a-dec.com

A-dec Avustralya

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Avustralya
Tel: 1.800.225.010 Avustralya içinden
Tel: +61.(0).2.8332.4000 Avustralya dışından

A-dec Çin

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
Building 5, No. 528 Shunfeng Road
Tangqi Town, Yuhang District
Hangzhou, Zhejiang, Çin 311100
Tel: 400.600.5434 Çin içinden
Tel: +86.571.89026088 Çin dışından

A-dec Birleşik Krallık

Austin House
11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
İngiltere
Tel: 0800.ADEC.UK (2332.85) İngiltere içinden
Tel: +44.(0).24.7635.0901 İngiltere dışından



86.0092.15 Rev L
Yayın Tarihi 2021-06-21
Copyright 2021 A-dec, Inc.
Tüm hakları saklıdır.