


## Konzoly monitorů A-dec



Konzoly monitorů A-dec používají některý z následujících mechanismů nastavení polohy:


### **Samoaretační**

Tyto konzoly zajišťují trvalé napětí, které udržuje monitor v nastavené poloze.

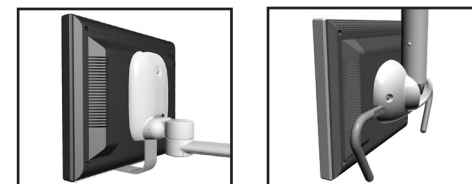

### **S ruční aretací**

Na těchto konzolách je páčka, která umožňuje nastavenou polohu sklonu monitoru ručně zaaretovat.

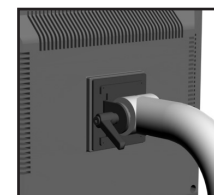

Konzoly monitorů A-dec jsou kompatibilní se standardem VESA (Video Electronics Standards Association), a proto podporují většinu značek a velikostí monitorů.



**POZNÁMKA:** Konzoly monitoru A-dec jsou určeny pro umístění a polohování plochého monitoru určeného pro zdravotnictví nebo ekvivalentního monitoru. Požadavky na monitory jsou uvedeny v tabulce na straně 3.



Seřízení napětí ve vswlém směru	Velikost šestihhranného klíče	Způsob seřízení	K dispozici pro	Maximální hmotnost monitoru	Maximální velikost monitoru
<p><b>Provedení 1, samoaretací</b>  Otočením šestihhranného klíče po směru hodinových ručiček napětí zvýšíte, otočením proti směru hodinových ručiček je snížíte.</p>	3/16 palce	Samoaretace, jedno napětí	křesla, bloky podpory	9 kg (20 liber)	Úhlopříčka 483 mm (19 palců)
<p><b>Provedení 2, samoaretací</b>  Otočením šestihhranného klíče po směru hodinových ručiček napětí zvýšíte, otočením proti směru hodinových ručiček je snížíte. Toto seřízení bude pravděpodobně třeba provést pro napětí směrem nahoru i pro napětí směrem dolů.</p>	5/32 palce	Samoaretace, dvě napětí	křesla, bloky podpory, připevnění ke kolejnici skřínky	14 kg (31 liber)	Úhlopříčka 483 mm (19 palců)
<p><b>Provedení 3, samoaretací</b>  Pomocí šestihhranného klíče o velikosti 1/8 palce odstraňte šrouby zadního krytu. Pomocí šestihhranného klíče o velikosti 5/32 palce zvýšte nebo snižte napětí konzoly ve vswlém směru.  <i>(Poznámka: Po sejmutí krytu může být poloha rukojetí změněna. Pomocí šestihhranného klíče o velikosti 1/8 palce odstraňte a vyměňte šrouby rukojetí.)</i></p>	1/8 palce 5/32 palce	Samoaretace, jedno napětí	stropy, skřínky, stěny	9 kg (20 liber)	Úhlopříčka 483 mm (19 palců)
<p><b>Provedení 4, s ruční aretací</b>  Otočením páčky po směru hodinových ručiček monitor v dané poloze zaaretujete.</p>	—	Ruční aretace, páčka	křesla, bloky podpory	9 kg (20 liber)	Úhlopříčka 483 mm (19 palců)

## Technické údaje a záruka



**DŮLEŽITÉ INFORMACE** Informace o záruce, technické údaje o parametrech zapojení do elektrické sítě, vysvětlení symbolů a údaje o dalších zákonných požadavcích jsou uvedeny v dokumentu *Povinné informace, technické údaje a záruka* (p/n 86.0221.11), který je k dispozici v Centru zdrojů na adrese [www.a-dec.com](http://www.a-dec.com).



**POZNÁMKA:** Technické údaje mohou být bez upozornění změněny. Požadavky se mohou v závislosti na místě vašeho působiště lišit. Další informace vám poskytne autorizovaný prodejce společnosti A-dec.

## Modely a verze produktů popsané v tomto dokumentu

Modely	Verze	Popis
200, 300, 381, 382, 482, 581, 584, 585, 586, 587, Performer 8000	A	Konzola monitoru



2601 Crestview Drive  
Newberg, Oregon 97132  
Spojené státy americké  
[www.a-dec.com](http://www.a-dec.com)

Mascot, NSW 2020  
Austrálie  
[www.a-dec.com](http://www.a-dec.com)

6KDDG  
Anglie  
[www.a-dec.com](http://www.a-dec.com)

1XEWROVBE  
Anglie  
[www.a-dec.com](http://www.a-dec.com)

