


## Supports d'écran A-dec



Les supports d'écran A-dec utilisent l'un des mécanismes de positionnement suivants :


### Flottant

Ces supports fournissent une tension continue qui maintient l'écran en place lorsqu'il a été positionné.

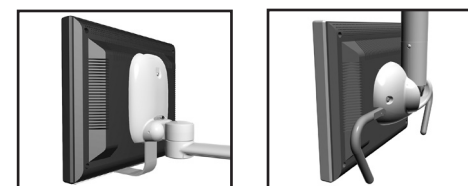

### Verrouillé

Ces supports incluent une poignée qui permet de verrouiller manuellement l'inclinaison de l'écran.

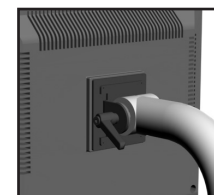

Les supports d'écran A-dec sont conformes à la norme VESA (Video Electronics Standards Association) et sont donc compatibles avec la plupart des marques et des tailles d'écran.




**REMARQUE** Les supports d'écran A-dec sont destinés à supporter et à positionner un écran plat à usage médical ou équivalent. Les caractéristiques de l'écran à respecter figurent dans le tableau de la page 3.


## Réglages et caractéristiques techniques du support d'écran

Pour connaître les réglages et les caractéristiques techniques de l'écran en fonction du type de support, se reporter aux images ci-dessous et au tableau de la page 3.


### Type 1, flottant

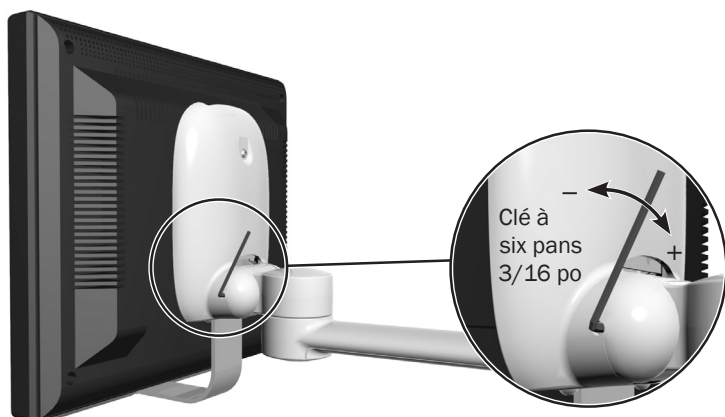


### Type 2, flottant

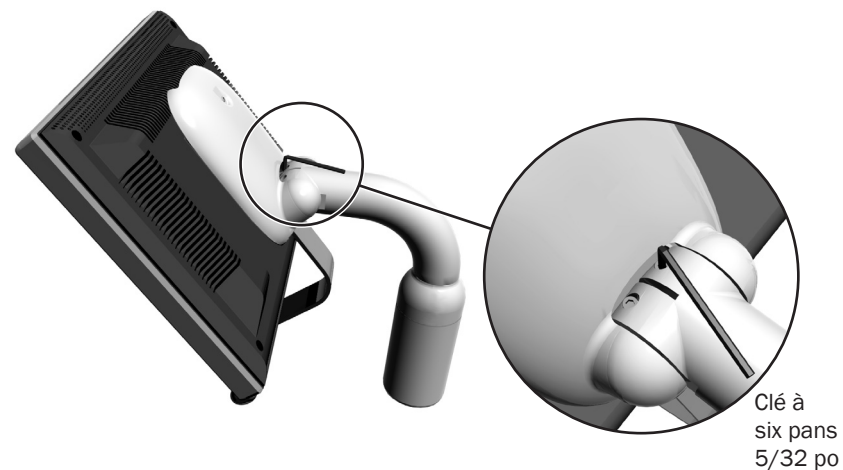

### Type 3, flottant

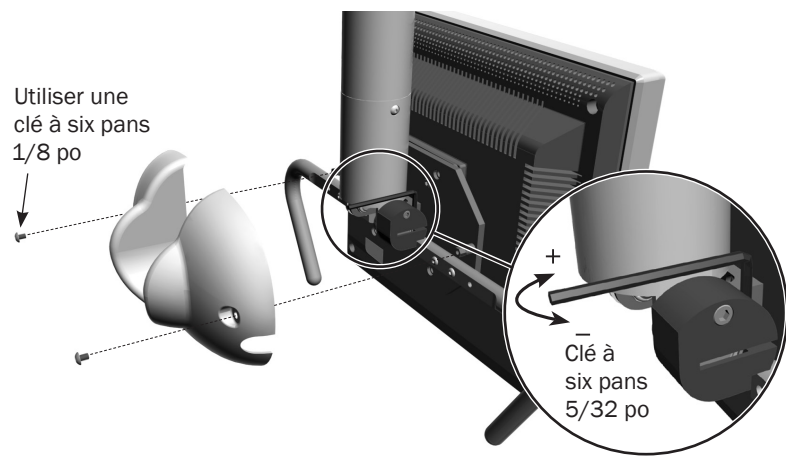

### Type 4, verrouillé

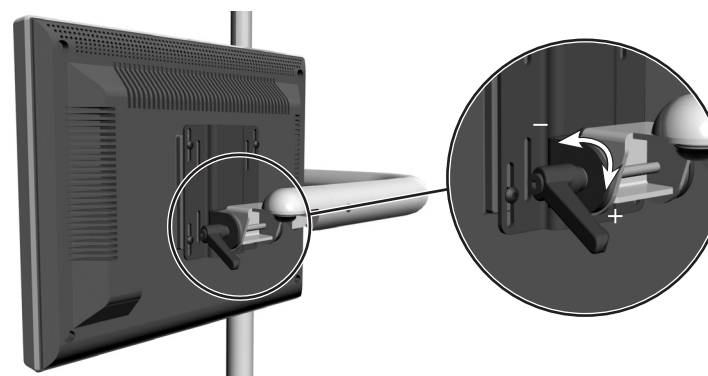

Réglage de la tension verticale	Taille de la clé à six pans	Type de réglage	Disponible sur	Poids maximal de l'écran	Taille maximale de l'écran
<b>Type 1, flottant</b> Tourner la clé à six pans dans le sens horaire pour augmenter la tension, ou dans le sens anti-horaire pour la réduire.	3/16 po	Flottant/tension unique	fauteuil, support central	9 kg (20 livres)	483 mm (19 pouces en diagonale)
<b>Type 2, flottant</b> Tourner la clé à six pans dans le sens horaire pour augmenter la tension, ou dans le sens anti-horaire pour la réduire. Ce réglage peut être nécessaire avec la tension vers le haut et la tension vers le bas.	5/32 po	Flottant/tension double	fauteuil, support central, montage sur rail et armoire	14 kg (31 livres)	483 mm (19 pouces en diagonale)
<b>Type 3, flottant</b> Utiliser une clé à six pans de 1/8 po pour retirer les vis du cache arrière. Utiliser une clé à six pans de 5/32 po pour augmenter ou réduire la tension verticale du support.  <i>(Remarque : les poignées peuvent être repositionnées une fois le cache retiré. Utiliser une clé à six pans de 1/8 po pour retirer et replacer les vis des poignées.)</i>	1/8 po 5/32 po	Flottant/tension unique	plafond, armoire, mur	9 kg (20 livres)	483 mm (19 pouces en diagonale)
<b>Type 4, verrouillé</b> Tourner la poignée dans le sens horaire pour verrouiller la position de l'écran.	n/d	Verrouillage/poignée	fauteuil, support central	9 kg (20 livres)	483 mm (19 pouces en diagonale)

## Caractéristiques et garantie



**IMPORTANT** Pour connaître la garantie, les caractéristiques électriques, la signification des symboles et les autres exigences réglementaires, consulter le document *Informations réglementaires, caractéristiques techniques et garantie* (réf. 86.0221.01), disponible dans le Centre de ressources du site [www.a-dec.com](http://www.a-dec.com).



**REMARQUE** Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis. Les réglementations peuvent varier selon le pays. Pour plus d'informations, contacter votre distributeur A-dec agréé.

## Modèles et versions des produits abordés dans ce document

Modèles	Versions	Description
200, 300, 381, 382, 482, 581, 584, 585, 586, 587, Performer 8000	A	Support d'écran



### Siège social d'A-dec

2601 Crestview Drive  
12420 URB  
États-Unis  
0610XWDW8000  
0610W8000  
[www.a-dec.com](http://www.a-dec.com)

### A-dec Australie

□  
D  
Mascot, NSW 2020  
Australie  
0610XWUDOB  
0610XWUDOB

### A-dec Chine

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.  
528 Shunfeng Road  
Qianjiang Economic Development Zone  
Hangzhou 311100, Zhejiang, Chine  
Tél. : 400 600 5434 (en Chine)  
Tél. : +86 571 89026088 (hors Chine)

### A-dec Royaume-Uni

Austin House, 11 Liberty Way  
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ  
Angleterre  
Tél. : 0800 ADEC UK (2332 85) (au Royaume-Uni)  
Tél. : +44 (0) 24 7635 0901 (hors Royaume-Uni)



1434

86.□ .01 Rev  
Date de publication 2020-03-□  
Copyright 2020 A-dec Inc.□  
Tous droits réservés.